



GOLDEN**PROTECT**

Scaun cu roțile manual

Manual de instrucțiuni



Rezumat

Cererea de scaune cu roțile pe piață este în creștere.

Scaunele cu roțile sunt un mijloc de transport fiabil pentru persoanele cu handicap, bolnave, vârstnice și infirme. Odată cu progresul și dezvoltarea societății, scaunele cu roțile au evoluat de la un simplu mijloc de transport pentru persoanele cu dizabilități la un instrument indispensabil pentru ca persoanele în vârstă și cele cu dizabilități pentru efectuarea exercițiilor fizice, să aibă grijă de ele însele și să participe la activități sociale. Acesta a jucat un rol important în a le permite acestora să se întoarcă în societate și să își sporească încrederea în sine.

Scaunul cu roțile este conceput pentru a facilita circulația auto asistată a persoanelor cu handicap, varstnici, persoane ranite, în timpul perioadei de reabilitare după traumatisme sau intervenții chirurgicale.

Este destinat pentru sprijinirea persoanelor cu greutate corporală mai mică de 100 kg.

Principiul de lucru

Scaunul cu roțile manual este condus de către utilizator sau împins de mână îngrijitorului pentru a ușura deplasarea bolnavilor sau persoanelor în vârstă.

三、 Structura și compoziția

Scaunul cu roțile manual este alcătuit dintr-un cadru, un spătar, o pernă de scaun, o roată față, o roată spate, un suport pentru mâini, o frână și un suport pentru picioare.

四、 Aplicare

Este potrivit pentru transportul în interior și în exterior al persoanelor cu handicap, al bolnavilor, al persoanelor în vârstă și al infirmilor.

五、 Indexul de performanță al produsului

Punerea la sol a roților: toate roțile, cu excepția roților de ridicare, trebuie să fie pe sol fără probleme; stabilitate statică: înclinare longitudinală înainte: ≥ 100 ; înclinare longitudinală înapoi: ≥ 100 ; rulare: ≥ 150 ; performanță înclinată în picioare: ≥ 80 ; decalaj de alunecare: ≤ 350 mm; rază minimă de întoarcere: ≤ 850 mm; lățime minimă de întoarcere: ≤ 1500 mm; utilizați numărul standard: GB/T13800-2009.

Dimensiuni și parametri principali

Dimensiuni

Lățimea scaunului: 46 cm

Lățimea totală a scaunului (cu roțile laterale): 62 cm

Înălțime scaun: 50 cm

Adâncime scaun: 41 cm

Înălțime spate: 41 cm

Înălțime totală: 123 cm

Masa, ≤ 22 kg. Specificațiile roților față, 6 inci $\sim$ 8 inci. Specificații roți spate, $16 \times 1,75 \sim 24 \times 13/8$.

六、 Materiale care necesită atenție sporită

1. Citiți și înțelegeți cu atenție instrucțiunile înainte de a utiliza scaunul cu roțile.
2. Dacă luați sau folosiți un scaun cu roțile pentru prima dată, trebuie să fiți însoțit de cineva.
3. La urcarea sau coborârea din scaunul cu roțile, este interzis să stați pe suportul pentru picioare și să exercitați o forță asupra piciorului.

Repaos

4. Vă rugăm să folosiți frânele atunci când urcați sau coborâți din scaunul cu roțile și este strict interzisă folosirea frânelor.

În timpul conducerii.

5. Când stați într-un scaun cu roțile, trebuie să vă mențineți echilibrul în stânga și în dreapta și să vă țineți corpul aproape de spătar.
6. Nu vă puneți corpul în afara caruciorului, deoarece poziția centrului de greutate se schimbă și caruciorul cade și se rostogolește.

Urcare

7. Nu urcați panta de unul singur.
 8. Frânele scaunelor rulante nu pot fi folosite pentru decelerare la coborârea unei pante.
 9. Schimbarea direcției de deplasare la coborâre va face ca scaunul cu roțile să fie instabil sau chiar să cadă.
 10. Scaunele cu roțile nu pot fi utilizate pe drumuri înclinate cu o pantă mai mare de 8.
 11. Când deplasați scaunul rulant, trebuie să prindeți cu ambele mâini partea fixă de conectare a scaunului rulant.
- pentru a evita să vă ciupiți degetele.
12. Nu utilizați acid, alcalin sau alte substanțe chimice corozive pentru a curăța scaunul rulant.
 13. Durata maximă de viață este de 5 ani.
 14. Persoanele cu mobilitate limitată a membrelor superioare trebuie să fie purtate de un îngrijitor atunci când folosesc un scaun cu roțile.
 15. Capacitatea maximă de încărcare a scaunelor cu roțile manuale este de 100 kg.
 16. Verificați frecvent dacă elementele de fixare sunt slăbite pentru a asigura funcționarea normală a scaunului cu roțile manual.
 17. Atunci când utilizatorul folosește scaunul cu roțile pentru a conduce singur, acesta trebuie să își puna centura de siguranță, să își așeze picioarele pe suportul pentru picioare și să conducă la o viteză constantă, iar viteza de deplasare nu trebuie să fie prea mare.

七、Instrucțiuni

(1) Desfășurarea Cadru Principal: Când deschideți scaunul cu roțile, puteți apăsa pe ambele părți sau pe o parte a scaunului cu roțile, iar acesta poate fi deschis cu ușurință.

Bratele Laterale sunt pliabile.


Poate fi pliat (a se vedea imaginea D din dreapta).

se ridică atunci când este pliată



Imagine D

(2) Frânele sunt instalate pe ambele părți ale scaunului cu roțile, iar frânele trebuie folosite pentru a parca scaunul cu roțile la parcare (a se vedea figura E din dreapta).

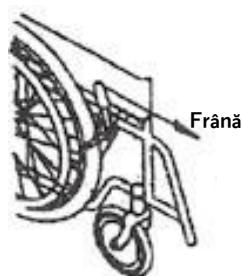

Imagine E


(3) Există o bară de înclinare cu un capac de plastic în partea din spate și în partea inferioară a scaunului cu roțile. Însoțitorul calcă puternic pe bara de înclinare pentru a face scaunul rulant să se încline înapoi. (a se vedea figura F din dreapta).



Imagine F

(4) Atunci când trebuie să urcați și să coborâți treptele, vă rugăm să ajutați pacientul să urce și să coboare mai întâi treptele, apoi să mutați scaunul cu roțile pe un drum plat înainte de a merge.

(5) Întreținerea corespunzătoare a scaunului rulant poate prelungi durata de viață a acestuia. De obicei, ar trebui să aplicați des ulei de lubrifiere cu o cârpă moale și curată și să ștergeți scaunul cu roțile. Scaunele rulante trebuie dezinfectate atunci când se schimbă pacienții cu boli infectioase. Adăugați ulei de lubrifiere la piesele rotative la fiecare 3 până la 6 luni pentru a le face să se rotească flexibil. Dacă utilizatorii aleg anvelope pneumatice, trebuie să acorde atenție menținerii unui volum de aer suficient, altfel va fi dificil de condus și se vor deteriora anvelopele.

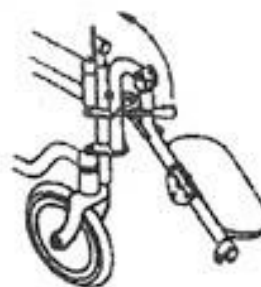

Imagine Y

(6) Suporturile pentru picioare pot fi ridicate și reglate pe înălțime. Atunci când ridicați suportul de picior, trebuie doar să ridicați suportul de picior până la o poziție adecvată, iar apoi poate fi fixat în suruburi. Montați suporturile de picioare în clemenele lor, ajustați la înălțimea necesară și fixați-le. (a se vedea în figura Y din dreapta).

Reglarea și Fixarea Poziției Picioarelor:

Pentru confortul și suportul optim al picioarelor, scaunul cu roțile include perne care se pot atașa în spatele suporturilor pentru picioare.

Pasul 1: Pregătirea Pernelor

- Localizați pernele și șuruburile corespunzătoare furnizate în kit.

Pasul 2: Montarea Pernelor

- Poziționați perna în spatele suportului pentru picioare la înălțimea dorită.
- Asigurați-vă că partea concavă a pernei este îndreptată către scaun, pentru a se mula pe conturul piciorului.

Pasul 3: Fixarea Pernelor

- Folosiți șuruburile pentru a fixa perna de suportul pentru picioare, trecându-le prin găurile predefinite.
- Strângeți șuruburile manual sau cu ajutorul unei șurubelnițe, asigurându-vă că perna rămâne fermă în poziție.

Pasul 4: Verificarea și Ajustarea

- După montarea pernei, verificați dacă aceasta este bine fixată și că oferă suport adecvat pentru picior.
- Ajustați poziția pernei sau strângeți șuruburile după necesitate.

Verificări Finale: Asigurați-vă că toate componentele sunt fixate corespunzător și că scaunul cu roțile este stabil.

八、Îngrijire și Întreținere

1. Folosiți un detergent neutru atunci când frecați și păstrați caruciorul într-un loc uscat și ventilat.
2. Păstrați o presiune suficientă a anvelopelor.
3. Piese rotative trebuie să fie umplute cu ulei de lubrifiere în mod regulat.
4. Pentru depozitarea pe termen lung, ștergeți întreaga carucior cu o cârpă moale.
5. Verificați întotdeauna performanța frânelor și a centurilor de siguranță, precum și uzura și deteriorarea pieselor și încredințați profesioniștilor repararea la timp a oricăror probleme pentru a evita pericolele.

Contraindicații

Nu poate fi folosit ca mașină sport pentru persoanele cu dizabilități și nici ca mașină de dans în scaun cu roțile.

+、Ambalare și depozitare

După ce scaunul cu roțile este pliat, puneți punga de plastic exterioară în cutia specială de ambalare. Scaunele cu roțile manuale ambalate trebuie depozitate într-un depozit uscat, bine ventilat, la o temperatură ambiantă de -40°C – 50°C și o umiditate care să nu depășească 90%, fără substanțe corozive sau surse de căldură în jur.

+一、Servicii post-vânzare

În conformitate cu principiul de serviciu al clientului în primul rând și satisfacția clientului, compania noastră realizează următorul domeniu de servicii.

1. În condiții normale de utilizare și depozitare, scaunul rulant trebuie utilizat în termen de trei luni de la data vânzării. Facturile de garanție fac obiectul garanției.
2. În condiții normale de utilizare, dacă există o problemă de calitate a produsului, acesta va fi înlocuit gratuit în termen de o lună.
3. În timpul perioadei de garanție, în cazul în care piesele sunt deteriorate din cauza utilizării sau depozitării

necorespunzătoare de către utilizator, compania va furniza piesele la un preț preferențial.

4. După expirarea perioadei de garanție, în cazul în care apare o defecțiune sau piesele sunt vechi și deteriorate, compania va continua să furnizeze piese pentru utilizator, dar se va percepe o taxă corespunzătoare.

5. Scurgerile de aer din camera de aer, deteriorările de suprafață și rugina nu sunt acoperite de garanție.

十二、Descrierea produsului

