

PENSĂ CHIRURGICALĂ 1×2 — 12 cm

Oțel inoxidabil · instrument chirurgical reutilizabil · GIMA Professional Medical Products



Cod produs **26692**

Unitate de vânzare **1 bucată**

Comandă minimă **1 bucată**

Tip **Dispozitiv medical**

Clasă de risc **I (nesteril)**

DESCRIERE

Pensă chirurgicală din oțel inoxidabil, cu lungimea de 12 cm și profil cu dinți 1×2, destinată prinderii ferme a țesuturilor în cadrul procedurilor chirurgicale. Instrument reutilizabil, livrat nesteril, fabricat de Gima S.p.A. (Italia).

DESTINAȚIE DE UTILIZARE

Instrumentele sunt destinate exclusiv personalului medical special instruit în utilizarea și întreținerea lor. Utilizarea incorectă sau întreținerea necorespunzătoare poate duce rapid la deteriorarea instrumentului.

CODURI DE IDENTIFICARE ȘI ÎNREGISTRARE

RDM (NSIS)
141832

CND
L031310

EAN/UPC
8023279266924

UMDNS
11777

PARAF
988194674

GTIN
08023279266924

GMDN
62467

REPREZENTANT CH
Da

REPREZENTANT UK
Nu

PRODUCĂTOR ȘI CONFORMITATE

Gima S.p.A., Via Marconi 1, 20060 Gessate (MI), Italia · www.gimaitaly.com · Fabricat în Pakistan.
Dispozitiv medical purtător de marcaj CE, conform Directivei 93/42/CEE; în acord cu MDCG 2020-2, va fi adus în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745 prin schimbarea de clasă.

CONDIȚII DE PĂSTRARE

Produs nesteril · A se feri de lumina solară · A se păstra în loc răcoros și uscat

CURĂȚARE, ÎNTREȚINERE ȘI STERILIZARE

Conform manualului de utilizare al producătorului (Gima, M26703) pentru instrumente chirurgicale reutilizabile.

REGULI GENERALE

- Înainte de prima utilizare și după fiecare utilizare, instrumentele se curăță, se usucă și se sterilizează.
- Instrumentele trebuie curățate întotdeauna înainte de sterilizare.

CURĂȚARE

- Curățare automată: folosiți exclusiv echipamente de spălare cu detergenți aprobați și certificați.
- Curățare manuală: folosiți detergenți aprobați și certificați, perie și apă curentă. Respectați întotdeauna instrucțiunile de utilizare ale detergentului.
- Curățați instrumentele atât în poziție deschisă, cât și închisă; clătiți timp de 3 minute și verificați de mai multe ori că apa intră și iese din orificiile oarbe.
- La clătirea finală folosiți apă complet demineralizată.
- Uscați întotdeauna instrumentele — instrumentele neuscate pot fi deteriorate prin coroziune.

ÎNAINTE DE STERILIZARE

- După curățare, tratați instrumentele cu ulei sigur din punct de vedere fiziologic — în special vârfurile, conectorii, terminalele și toate părțile mobile.
- Evitați contactul produsului cu acizi sau alți dezinfectanți agresivi, care îl pot coroda.

STERILIZARE

Metoda recomandată: autoclavă cu abur — max. 134 °C (273 °F), max. 10 minute

Procesul de sterilizare cu abur trebuie să se desfășoare în conformitate cu EN ISO 17664.
Depășirea acestor parametri poate deteriora produsul.

- Sterilizare cu aer cald: temperatură recomandată între 180 °C și 200 °C.
- Instrumentele pot fi dezinfectate și în termodezinfecitoare, până la o temperatură de 121 °C.
- La validarea procesului de sterilizare, verificați caracterul adecvat al măsurilor de uscare: umiditatea din container poate provoca ruginirea instrumentelor. Uscarea insuficientă se datorează adesea poziționării incorecte a încărcăturii și lavetelor de uscare neadecvate.
- Nu există un număr maxim recomandat de cicluri de sterilizare — acesta depinde de starea produsului. Instrumentele care prezintă semne de coroziune se elimină imediat.

INSPECȚIE VIZUALĂ — LA FIECARE UTILIZARE

- Muchiile ascuțite trebuie să fie fără știrbituri, cu tăiș continuu; instrumentele cu părți lungi nu trebuie să prezinte deformări.
- Instrumentele care fac parte dintr-un ansamblu se verifică împreună cu celelalte componente.
- Verificați mișcarea de rotație a articulațiilor (fără joc excesiv) și funcționarea sistemelor de blocare.

GARANȚIE ȘI AVERTIZĂRI

- Se aplică garanția standard Gima B2B de 12 luni.
- Toate accidentele grave legate de dispozitivul medical furnizat se raportează producătorului și autorității competente a statului membru în care este înregistrat sediul dumneavoastră.