

Targă pliabilă cu roți

Pliabilă în 2 · separabilă în două jumătăți · roți, picioare de sprijin și spătar reglabil · aluminiu + pânză impermeabilă

GIMA 34077 · REF producător TD010112 | Doc. M34077-M-Rev.7-04.25 | Dispozitiv medical Clasa I — Regulamentul (UE) 2017/745 | Traducere în limba română

OBLIGAȚIE DE RAPORTARE (MDR): Toate accidentele grave survenite în legătură cu dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportate producătorului și autorității competente a statului membru în care este înregistrat sediul dumneavoastră. (În România: Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România — ANMDMR.)

1. CARACTERISTICI TEHNICE

Dimensiuni desfășurată (L × l × H)	188 × 53 × 21 cm
Dimensiuni pliată (L × l × H)	92 × 50 × 11 cm ¹
Dimensiuni ambalaj (2 buc./cutie)	96 × 54 × 21 cm
Greutate netă / brută	8 kg / 9 kg
Capacitate portantă	150 kg ²

2. MOD DE UTILIZARE

Această targă de prim ajutor, pliabilă și separabilă, este destinată în principal transportului pacienților cu fracturi. Ambele capete ale târgii sunt prevăzute cu cuplaje articulate (tip balama) care permit separarea târgii într-o jumătate dreaptă și una stângă. Aceasta permite ca pacientul să fie așezat pe targă, pe masa de operație sau pe pat în mod rapid și cu blândețe, fără a fi ridicat.

Principiul separării (tip „scoop”): cele două jumătăți se desfac, se poziționează de o parte și de alta a pacientului aflat la sol, apoi se recuplă sub pacient. La destinație, procedura inversă permite retragerea târgii fără mutarea pacientului.

3. DOMENIU DE APLICARE

Validat de practica clinică, acest articol este adecvat pentru ambulanță, spital, situații de urgență în teren și săli de sport, pentru transportul răniților și al pacienților. Poate fi utilizat, de asemenea, în activitatea medicală generală.

4. ATENȚIUNĂRI

- La transportul pacienților cu această targă, **asigurați-vă că dispozitivul de blocare a cuplajelor este strâns ferm și fixați centurile de siguranță**, pentru protecția pacientului.
- În utilizarea curentă, aveți grijă să nu rupeți sau să nu perforați suprafața (pânza) târgii.

Verificare critică înainte de fiecare ridicare: ambele cuplaje de la capete trebuie să fie complet închise și blocate. O targă cu un cuplaj incomplet blocat se poate desface sub greutatea pacientului. Nu ridicați pacientul înainte de a verifica vizual și manual ambele mecanisme de blocare și de a fixa centurile.

5. ÎNTREȚINERE

5.1 Indicațiile producătorului

- Mențineți targa curată în mod curent (inclusiv sterilizare/dezinfecție).
- Verificați frecvent dacă există componente slăbite.

Secțiunea 5.2 de mai jos reprezintă recomandări practice de întreținere elaborate de Golden Protect pentru exploatarea în serviciile de urgență și unitățile sanitare. Acestea completează, fără a înlocui, indicațiile producătorului de la punctul 5.1. În caz de neconcordanță, prevalează indicațiile producătorului.

5.2 Plan de întreținere recomandat

Interval	Operațiune	Metodă și criteriu de acceptare
Înainte de fiecare utilizare	Verificarea cuplajelor de separare	Închiderea și blocarea completă a ambelor mecanisme; test de tracțiune ușoară pe cele două jumătăți. <i>Criteriu:</i> cuplajele nu cedează și nu prezintă joc.
Înainte de fiecare utilizare	Verificarea centurilor de siguranță	Control al integrității chingii și al funcționării cataramelor. <i>Criteriu:</i> chingă fără tăieturi sau destrămări, catarama care se închid și se deschid ferm.
După fiecare pacient	Curățarea și dezinfecția pânzei	Spălare cu apă și detergent neutru, urmată de dezinfectant compatibil cu suprafețe din nailon vinilizat; uscare completă la aer, cu targa desfășurată, ferită de soare direct.
După fiecare pacient	Curățarea cadrului	Ștergerea tuburilor de aluminiu, a articulațiilor, a roților și a picioarelor de sprijin cu lavetă și agent necoroziv; uscare.
Săptămănal	Verificarea pânzei	Control pentru tăieturi, perforații, destrămarea cusăturilor și desprinderea din punctele de fixare pe cadru. <i>Criteriu:</i> orice deteriorare a pânzei scoate targa din uz până la remediere — pânza este elementul portant.
Săptămănal	Verificarea roților și a picioarelor	Îndepărtarea murdăriei de pe axul roților; verificarea rotirii libere și a fixării picioarelor de sprijin.
Lunar	Verificarea articulațiilor și a spătarului	Acționarea completă a mecanismului de pliere și a spătarului reglabil. <i>Criteriu:</i> mișcare fermă, fără blocaje; spătarul își menține poziția în fiecare treaptă de reglare.
Lunar	Restrângerea elementelor de asamblare	Verificarea și restrângerea tuturor îmbinărilor filetate și a niturilor cu joc vizibil.
Trimestrial	Test de încărcare vizual	Inspecția cadrului sub sarcină moderată, aplicată uniform. <i>Criteriu:</i> fără deformări remanente ale tuburilor de aluminiu.
Anual	Evaluarea stării generale	Decizie de menținere în uz, înlocuire a pânzei/centurilor ori scoatere din exploatare. Se recomandă evidența scrisă a verificărilor pentru fiecare targă din dotare.

Interdicții: solvenți și agenți corozivi pe pânză și pe cadru · uscarea pânzei pe surse de căldură sau la soare direct · sterilizarea termică la temperaturi neconfirmate de producător (pentru dezinfecție de nivel înalt, utilizați metode chimice compatibile cu nailonul vinilizat) · utilizarea târgii cu pânza deteriorată sau cu un cuplaj defect · depășirea sarcinii maxime de 150 kg.

6. DEPOZITARE ȘI TRANSPORT

1. Depozitați produsul într-un loc ferit de umezeală și fără agenți corozivi.
2. Produsul poate fi transportat cu vehicule de transport obișnuite.
3. A se păstra într-un loc răcoros și uscat; a se feri de lumina directă a soarelui.

7. AMBALAJ

1. Ambalat în cutie de carton de înaltă rezistență, cu bază de lemn.
2. Coletul conține: certificat de inspecție, manual de utilizare și listă de ambalare.

8. LEGENDA SIMBOLURILOR

Simbol	Semnificație
Simbol fabrică	Producător
REF	Cod de produs
LOT	Număr de lot
Carte cu „i”	Consultați instrucțiunile de utilizare
Glob cu pachet	Importat de
Umbrelă	A se păstra într-un loc răcoros și uscat
Soare barat	A se feri de lumina soarelui
MD	Dispozitiv medical
Calendar cu simbol fabrică	Data fabricației
CE	Dispozitiv medical conform Regulamentului (UE) 2017/745 (MDR)
Triunghi cu semn de exclamare	Atenție: citiți cu atenție instrucțiunile (avertismentele)
EC REP	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană
UDI	Identificator unic al dispozitivului

9. GARANȚIE

Se aplică garanția standard B2B Gima de **12 luni**.

10. IDENTIFICARE PRODUS

Cod GIMA	34077
REF producător	TD010112
Clasificare	Dispozitiv medical Clasa I — Regulamentul (UE) 2017/745 (MDR)
Producător	Zhangjiagang Tengda Machinery Manufacturer Co., Ltd. No.999 Hongqi Road, Changyinsha Modern Agricultural Demonstration Area, Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, R.P. Chineză
Țară de fabricație	China
Reprezentant autorizat UE (EC REP)	SUNGO Europe B.V., Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7, 2909VA Capelle aan den IJssel, Țările de Jos
Importator	Gima S.p.A., Via Marconi 1, 20060 Gessate (MI), Italia
Distribuitor în România	Golden Protect — SPEQTUS ENTERPRISE SRL

Note de sursă

- ¹ Manualul producătorului indică dimensiunea pliată **92 × 50 × 11 cm**; fișa comercială GIMA indică **92 × 53 × 12 cm**. Diferența este minoră (3 cm lățime, 1 cm grosime) și nu afectează utilizarea, dar la publicare se recomandă valoarea din manual, acesta fiind documentul care însoțește produsul.
- ² Manualul producătorului formulează capacitatea drept „mai puțin de 159 kg”, iar fișa comercială GIMA declară **150 kg**. A fost publicată valoarea de 150 kg — cea mai restrictivă și cea declarată comercial de importator. Sarcina maximă de lucru a produsului este așadar **150 kg**.