

Cap manechin adult Prestan Professional PRO⁺

Montarea pungii pulmonare · Înlocuirea insertului oro-nazal

Ambele operațiuni încep prin desprinderea ansamblului feței de partea posterioară a capului și se fac fără unelte. Se execută înainte de fiecare sesiune de instruire sau ori de câte ori consumabilele au fost folosite de un cursant.

A. MONTAREA PUNGII PULMONARE

- 1 Desprinde ansamblul feței**
Apasă simultan cele două butoane albastre de pe partea din spate a capului și ridică ansamblul feței.
- 2 Fixează punga pe insertul oro-nazal**
Pe partea posterioară a feței, împinge inelul pungii pulmonare pe tubul insertului oro-nazal, până se fixează prin presiune.
- 3 Remontează fața**
Așază ansamblul feței pe partea posterioară a capului aliniind mai întâi bărbia, apoi rabatează spre spate până se cuplează pinii din dreptul urechilor.

Verificare înainte de utilizare

- Ambii pini de la urechi sunt cuplați complet.
- Punga pulmonară stă întinsă, plat, în canalul din zona gâtului — fără pliuri sau răsuciri.

B. ÎNLOCUIREA INSERTULUI ORO-NAZAL

- 1 Desprinde ansamblul feței**
Apasă simultan cele două butoane albastre de pe partea din spate a capului și ridică ansamblul feței.
- 2 Scoate consumabilele folosite**
Îndepărtează de pe față pielea facială utilizată și insertul oro-nazal folosit.
- 3 Montează insertul nou**
Introdu insertul oro-nazal nou în buzunarul din interiorul pielii faciale.
- 4 Așază ansamblul pe față**
Poziționează ansamblul pregătit la pasul anterior pe față, cu insertul oro-nazal aliniat exact cu deschiderea din față. Presează de jur împrejurul zonei de contact pentru a-l așeza corect.
- 5 Fixează marginile**
Trece cu degetele mari dinspre frunte către creștet, apăsând ușor, astfel încât pielea facială să se întindă puțin peste față și marginile exterioare să rămână fixate.

Verificare înainte de utilizare

- Insertul oro-nazal este aliniat cu deschiderea din față, fără decalaj.
- Marginile exterioare ale pielii faciale sunt fixate pe tot conturul.

FOTOGRAFII DE REFERINȚĂ



OBSERVAȚII

Produsul nu conține latex din cauciuc natural. Pielea facială și insertul oro-nazal sunt consumabile individuale: se înlocuiesc pentru fiecare cursant, conform practicii de igienă a organizatorului cursului. Pentru operațiuni care nu sunt descrise aici, consultați instrucțiunile livrate de producător împreună cu manechinul.

PRODUCĂTOR

Prestan Products, LLC
Manechine de instruire pentru resuscitare cardio-pulmonară

DISTRIBUITOR ÎN ROMÂNIA

Golden Protect
SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L.
www.goldenprotect.ro · contact@goldenprotect.ro

Ghid de utilizare redactat de Golden Protect pentru clienții proprii, cu scop practic. Nu înlocuiește instrucțiunile producătorului livrate împreună cu produsul. Denumirile de produs și marca Prestan aparțin titularilor de drept.