



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

JEDNORAZOWE NAKRYCIE GŁOWY Z WIĄZANIEM
BONETĂ DE UNICĂ FOLOSINȚĂ CU LEGĂTURI

RO
Denumirea produsului Bonetă de unică folosință cu legături
Cod produs FGDCT-SM35
Model produs Bonetă cu legături, 62x14,5 cm
Structură și Compoziție Boneta este confecționată din 35-40g SMS, cu legături pentru fixare.
Domeniu de utilizare Produsele sunt utilizate în principal pentru izolarea generală în ambulatorii, secții, camere de inspecție, sală de curățenie, laborator etc. Sunt destinate utilizării de către profesioniștii din domeniul sănătății din spitale și clinici pentru a menține un nivel bun de igienă și a contribui la controlul infecțiilor.
Contraindicații Produsele pot fi folosite o singură dată și trebuie utilizate imediat după deschiderea ambalajului. Dacă pachetul este deteriorat, produsul este umed sau mucegăit. Nu folosiți.
Cum să utilizați produsul
1. Deschideți pachetul și scoateți boneta, apoi trageți de marginile acesteia cu ambele mâini.
2. Ridicați mâinile și puneți-vă boneta pe cap, apoi ajustați-o pentru a vă asigura că nu vă iese părul din ea.
Depozitare Se recomandă depozitarea acestora într-o cameră curată, cu umiditate care nu depășește 80%, fără gaz coroziv, într-un loc răcoros, uscat și bine ventilat.

 **Avertisment**
1. Acest produs este de unică folosință. A nu se refolosi.
2. Acest produs este de unică folosință. Nu împărțiți produsul dvs cu altcineva.
3. Este interzisă utilizarea produsului atunci când ambalajul sau bonetele sunt deteriorate.

Observație: Orice incident grav care a avut loc în legătură cu produsul trebuie raportat producătorului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul sau pacientul.

Termen de valabilitate 3 ani.
Data de fabricație A se vedea data indicată pe ambalaj
Data expirării A se vedea data indicată pe ambalaj

 REF	PL Numer katalogowy RO Cod produs		PL Przechowywać z dala od światła słonecznego RO A se păstra ferit de razele soarelui		PL Przechowywać w suchym miejscu RO A se păstra într-un loc răcoros și uscat	 REF	PL Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej RO Reprezentant autorizat pe teritoriul Comunității Europene
 LOT	PL Kod partii RO Număr de lot		PL Wyrób medyczny zgodny z Rozporządzenie (UE) 2017/745 RO Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile regulamentul (UE) 2017/745		PL Tą stroną do góry RO Această parte în sus		PL Jedno urządzenie, nie używaj ponownie RO Dispozitiv de unică folosință, a nu se refolosi
	PL Producent RO Producător		PL Data produkcji RO Data fabricației		PL Granica temperatury RO Limită de temperatură		PL Przeczytaj instrukcje użytkowania RO Citiți instrucțiunile de utilizare
	PL Nie sterylne RO Nesteril		PL Data ważności RO Valabil până la data de		PL Wyrób medyczny RO Dispozitiv medical		PL Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone RO A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
 UDI	PL Unikalny identyfikator urządzenia RO Identificator unic al dispozitivului				PL Delikatny, obchodź się ostrożnie RO Fragil, manevrați cu atenție		

GIMA 21098

 Xianning Full Guard Medical Products Co.,Ltd
Yongan East Avenue, Xianning Economic Development Zone, Xianning City, Hubei Province, China
Made in China

 **REF** FGDCT-SM35

Eingeführt von / Importado por / Importowane przez / Importat de:
Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

 **REF** Humiss Beratung
GmbH Gneisenaustraße 8.40477,
Düsseldorf, Deutschland

