



PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCT

TERMOMETRU ECOLOGIC

Orice accident grav produs, privitor la dispozitivul medical fabricat de firma noastră, trebuie semnalat producătorului și autorității competente în statul membru pe teritoriul căruia își are sediul utilizatorul.

- Termometrul clinic fără mercur este un dispozitiv de măsurare a temperaturii pacientului și poate fi folosit pentru a măsura temperatura prin metoda orală, axilară sau rectală.
- Produsul este în conformitate cu standardul EN +1:2000-12470A1:2009, Termometreclinice - Partea 1: Termometre de sticlă cu lichid metalic cu dispozitiv de maximum:
 - condițiile de utilizare: intervalul de temperatură de măsurare ar trebui să fie între 35°C - 42°C, iar temperatura ambiantă (numai pentru termometrul fără mercur) ar trebui să fie între 20°C - 30°C; dacă temperatura de depozitare este mai mică de 20°C, vă rugăm să păstrați termometrele la o temperatură cuprinsă între 20°C - 30°C timp de cel puțin 2-1 ore sau între 30°C - 35°C timp de zece minute înainte de utilizare sau testare.
 - Temperatura ar trebui să se mențină între 10°C - 42°C atunci când termometrul este depozitat și transportat;
 - Eliminarea termometrului: după utilizare, scuturați lichidul metalic în jos, apoi curățați-l și puneți-l în suportul de plastic pentru a evita o eventuală deteriorare.

Observație: țineți strâns și cu atenție capătul termometrului cu degetul mare și arătătorul, apoi scuturați ușor termometrul de mai multe ori până când lichidul coboară.

- Modalități de folosire
 - Înainte de utilizare, coloana de lichid trebuie să fie sub marcajul cu cel mai mic număr al scalei, apoi curățați și dezinfectați termometrul clinic în alcool medicinal sau puneți-l într-un tub de plastic sterilizat.
 - Aveți grijă să îl puneți sub limba pacienților dacă folosiți metoda orală, apoi puneți-i să închidă gura strâns.
 - Pentru uz rectal, aplicați un lubrifiant pe termometrul clinic înainte de a-l introduce în rect.
 - Aveți grijă să îl puneți la axila pacienților dacă folosiți metoda axilară și spuneți-le să strângă bine brațul pe lângă corp.

Se recomandă citirea indicației termometrului clinic la aproximativ 4 minute după pașii de măsurare de mai sus.

- Avertisment
 - Avertizați pacienții să nu mestece, să nu vorbească, nici să se joace cât timp țin termometrele sub limbă;
 - Copiii bolnavi trebuie lăsați să se întindă ușor și trebuie ajutați să țină celălalt capăt al termometrului clinic pentru uz rectal în cazul în care acesta este introdus prea adânc sau alunecă din anus.
 - Evitați să faceți baie, să mâncați sau să fumați cu o jumătate de oră înainte de măsurarea temperaturii corpului;
 - Termometrul nu este conceput pentru aplicații speciale (de exemplu, termometrepentru prematuri, termometre pentru ovulație);
- Eliminarea termometrelor clinice

Lichidul metalic este un aliaj format din galiiu, indiu și staniu. Acest termometru clinic trebuie manevrat cu grijă. În special, trebuie avut grijă să nu scăpați termometrul din mână sau să-l manevrați în așa fel încât să se poată deteriora. Când termometrele clinice se sparg, curățați lichidul metalic cu o cârpă umedă cu săpun, apoi puteți arunca produsul împreună cu alte deșeuri casnice.
- Descriere simbol

	Avertisment: Citiți și urmați cu atenție instrucțiunile (avertismente) de utilizare
	A se păstra departe de lumina soarelui
	A se păstra într-un loc racoros și uscat
	Citiți instrucțiunile de utilizare
	Producător
	Data fabricației
	Reprezentant autorizat
	Dispozitiv medical conform cu Regulamentul (UE) 2017/745
	Model
	Numărul lotului
	Limită de temperatură
	Fără mercur
	Importator
	Identificator unic de dispozitiv
	Dispozitiv medical
	Data de expirare

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

a
b

c

e

**Model - Modello - Modèle - Modell - Modelo - Mode-
lo - Μοντέλο - Модел - Model - Model - Model - Mo-
dell - Model - Model - Model - Model - نموذج** CR.W00

M25551-M-Rev.6-02.26

Gima 25551 - 25568 - 25586 25589



Wuxi Medical Instrument Factory Co., Ltd.
No. 43 Xixin Road, ZhangJing, Xibei Town,
Wuxi city, Jiangsu, 214194, China
Made in China



Lotus NL B. V.
Koningin Julianaplein 10, 1e Verd, 2595AA
The Hague, Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

