



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

ALTIMETRO DA PARETE

WALL MOUNTED HEIGHT METER

TOISE MURALE

ALTÍMETRO DE PARED

ALTÍMETRO DE PAREDE

WANDBEFESTIGTES ROLLMESSBAND

NAŚCIENNY WYSOKOŚCIOMIERZ

MĂSURĂTOR ÎNĂLȚIME MONTAT PE PERETE

FALRA SZERELHETŐ MAGASSÁGMÉRŐ

SEINÄASENTEINEN PITUUSMITTA

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΑΝΑΣΤΗΜΟΜΕΤΡΟ

مقياس طول حائطي التثبيت

РЪСТОМЕР, МОНТИРАН НА СТЕНА

SEINALE PAIGALDATAV PIKKUSMÕÕDIK

MJERITELJ VISINE MONTIRAN NA ZID

ANT SIENOS MONTUOJAMAS AUKŠČIO MATUOKLIS

WANDGEMONTEERDE LENGTEMETER

VÝŠKOMER MONTOVANÝ NA STENU

STENSKI MERILNIK VIŠINE

VÄGGMONTERAD LÄNGDMÄTARE

Incertezza di 9 mm a 2 metri

Uncertainty of 9 mm at 2 m

Au-delà de 2 mètres la valeur peut osciller de 9 mm

Oscilación de 9 mm a una distancia de 2 metros

Incerteza de medição (desvio-padrão) de 9 mm a 2 metros

Schwankung von 9 mm bei einer Distanz von 2 m

Niedokładność 9 mm na 2 m

Diferență de 9 mm la 2 m

2 méteren 9 mm-es pontatlanság előfordulhat

Epätarkkuus 9 mm 2 metrissä

Αβεβαιότητα 9 mm στα 2 μέτρα

نسبة الشك في القياس 9 ملم لكل 2 متر

Неточность 9 мм на 2 м

Mõõtemääramatus 2 m-l 9 mm

Odstupanje od 9 mm na 2m

9 mm paklaida 2m

Tolerantie 9 mm bij 2 m

Neistota 9 mm v 2 m

Odstopanje 9 mm na 2 m

Osäkerhet på 9 mm vid 2m

REF 27335



Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy

gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com

www.gimaitaly.com

Made in China

CE 0476



CARACTERISTICI

Măsurătorul de înălțime GIMA montat pe perete (cod 27335) este un instrument de măsurare a înălțimii unei persoane. Poate fi fixat pe perete și poate măsura până la 2 m. Nu ocupă mult spațiu și permite o citire rapidă.

INSTRUCȚIUNI



Nu trageți glisorul brusc, deoarece banda gradată se poate rupe.
Produsul trebuie utilizat numai de către personalul calificat.



Nu utilizați echipamentul dacă este deteriorat. Adresați-vă comerciantului de la care l-ați cumpărat. Evitați reparațiile de proastă calitate.

Reparațiile vor fi efectuate numai cu piese de schimb originale, care trebuie instalate conform destinației.

Deoarece produsul este fabricat din materiale rezistente la coroziune, potrivite pentru condițiile de mediu adecvate utilizării sale normale, nu necesită îngrijire specială.

Cu toate acestea, trebuie depozitat în condiții etanșe, asigurându-vă că este protejat de praf și murdărie pentru menținerea igienei. Mai mult, se recomandă ca produsul să fie depozitat într-un loc care poate fi ușor accesibil de către personal în caz de necesitate.

ÎNDEPĂRTAREA AMBALAJULUI



Amintiți-vă întotdeauna că elementele de ambalare (hârtie, celofan, capse, bandă adezivă etc.) pot tăia și/sau răni dacă nu sunt manipulate cu grijă. Acestea vor fi îndepărtate cu mijloace adecvate de către personalul responsabil; același lucru este valabil și pentru instrumentele utilizate pentru îndepărtarea ambalajelor (foarfece, cuțite etc.).

După deschiderea ambalajului, verificați mai întâi toate piesele și părțile care alcătuiesc produsul. Verificați să fie toate prezente și în stare perfectă.

INSTALARE

Pentru a ridica măsurătorul de înălțime montat pe perete, cursorul trebuie poziționat pe perete exact la o înălțime de 2 metri față de suprafața podelei și, menținând produsul compact, fixați plăcuța cu ajutorul diblurilor furnizate. Acum, măsurătorul de înălțime montat pe perete este gata de utilizare.

FUNCȚIONARE

Pentru a măsura înălțimea, pur și simplu luați cursorul cu o mână și trageți-l în jos până când acesta atinge capul persoanei care se măsoară, apoi citiți rezultatul aflat în linie cu bara roșie din fereastră.

ÎNTREȚINERE

Produsul a fost conceput pentru a fi durabil. Vă recomandăm ca instrumentul să fie curățat cu un detergent slab.



Curățați periodic banda dispozitivului de măsurare a înălțimii montat pe perete cu o cârpă umezită cu dezinfectant. Acordați o atenție deosebită cursorului.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

	IT - Attenzione: Leggere e seguire attentamente le istruzioni (avvertenze) per l'uso GB - Caution: read instructions (warnings) carefully FR - Attention: lisez attentivement les instructions (avertissements) ES - Precaución: lea las instrucciones (advertencias) cuidadosamente PT - Cuidado: leia as instruções (avisos) cuidadosamente DE - Achtung: Anweisungen (Warnungen) sorgfältig lesen PL - Ostrzeżenie - Zobacz instrukcję obsługi RO - Atenție: Citiți și respectați cu atenție instrucțiunile (avertismentele) de utilizare HU - Figyelem: Figyelmesen olvassa el és kövesse a használati utasításokat (figyelmeztetéseket) FI - Huomio: Lue käyttöohjeet (varoituskeset) ja noudata niitä huolellisesti GR - Προσοχή: Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες (ενστάσεις) AR - الحذر - قراءة التعليمات (التحذيرات) بعناية	IT - Fabbricante GB - Manufacturer FR - Fabricant ES - Fabricante PT - Fabricante DE - Hersteller PL - Producent RO - Producător HU - Gyártó FI - Valmistaja GR - Παραγωγός AR - الشركة المصنعة
	IT - Leggere le istruzioni per l'uso GB - Consult instructions for use FR - Consulter les instructions d'utilisation ES - Consultar las instrucciones de uso PT - Consulte as instruções de uso DE - Gebrauchsanweisung beachten PL - Przeczytaj instrukcję użytkowania RO - Citiți instrucțiunile de utilizare HU - Olvassa el a használati utasításokat FI - Lue käyttöohjeet GR - Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης AR - اقرأ بدقة وحرص تعليمات الاستخدام	IT - Conservare al riparo dalla luce solare GB - Keep away from sunlight FR - À conserver à l'abri de la lumière du soleil ES - Conservar al amparo de la luz solar PT - Guardar ao abrigo da luz solar DE - Vor Sonneneinstrahlung geschützt lagern PL - Przechowywać z dala od światła słonecznego RO - A se păstra ferit de razele soarelui HU - Napfénytől védve tárolandó FI - Säilytä auringonvalolta suojassa GR - Κρατήστε το μακριά από ηλιακή ακτινοβολία AR - يحفظ بعيداً عن ضوء الشمس
	IT - Dispositivo medico conforme alla Direttiva 93/42/CEE GB - Medical Device complies with Directive 93/42/EEC FR - Dispositif médical conforme à la directive 93/42 / CEE ES - Dispositivo médico según a la Directiva 93/42 / CEE PT - Dispositivo médico em conformidade com a Diretiva 93/42/CEE DE - Medizinprodukt gemäß Richtlinie 93/42/CEE PL - Wyrób medyczny zgodny z dyrektywą 93/42 / CEE RO - Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE HU - Dispozitiv medical realizat în conformitate cu prevederile Directivei 93/42/CEE FI - Direktiivin 93/42/ETY mukainen lääkekinnällinen laite GR - Ιατρική συσκευή σύμφωνα με την οδηγία 93/42 / CEE AR - جهاز طبي يتوافق مع التوجيه CEE/93/42	IT - Rappresentante autorizzato in Svizzera GB - Authorized Representative in Swiss FR - Représentant autorisé en Suisse ES - Representante autorizado en Suiza PT - Representante autorizado no Suíço DE - Autorisierter Vertreter im Schweizer PL - Autoryzowany Przedstawiciel w Szwajcarski FI - Valtuutettu edustaja Sveitsiläinen RO - Reprezentant autorizat în Elveția HU - Meghatalmazott képviselő az Svájci GR - Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος στο ΕΛΒΕΤΟΣ AR - الممثل المعتمد في سويسرا
	IT - Codice prodotto GB - Product code FR - Code produit ES - Código producto PT - Código produto DE - Erzeugniscode PL - Numer katalogowy RO - Cod produs HU - Termékkód FI - Tuotekoodi GR - Κωδικός προϊόντος AR - كود المنتج	CH REP
	IT - Numero di lotto GB - Lot number FR - Numéro de lot ES - Número de lote PT - Número de lote DE - Chargennummer PL - Kod partii RO - Număr de lo HU - Tételszám FI - Eränumero GR - Αριθμός παρτίδας AR - رقم الدفعة	