



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS


CINGHIE MONITOR FETALE RIUTILIZZABILI
REUSABLE FOETAL TRANSDUCER BELTS
SANGLES RÉUTILISABLES POUR TRANSDUCTEUR FOETAL
CORREAS PACIENTE INDIVIDUAL PARA Sonda FETAL
CORREIA FETAL TRANSDUTORA REUTILIZÁVEL
EINWEG-GÜRTEL FÜR FETALEN SCHALLKOPF
ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΖΩΝΗ ΜΟΡΦΟΤΡΟΠΕΑ
ΕΜΒΡΥΪΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
EENMALIGE FOETALE TRANSDUCER RIEM
PASEK PRZETWORNIAK PŁODU DO WIELOKROTNEGO
UŻYTKU
CUREA ABDOMINALĂ PENTRU MONITORIZARE FETALĂ,
REFOLOSIBILĂ
ÅTERANVÄNDBART FOSTERGIVAREBÄLTE

REF B08 (GIMA 29545)

Fabbricante / Manufacturer / Fabricant / Fabricante / Fabricante / Hersteller /
Κατασκευαστής / Fabrikant / Producent / Producător / Tillverkare:
Dongguan Belcare Medical Technology Co., Ltd.
402 of 4th. Block, #3 of Keyuan Road, Tangxia Town,
Dongguan, Guangdong, China 523710 - joe@belcare-med.com
Made in China

Importato da/Imported by/ Importé par/ Importiert von/ Importado
por/ Importado por/ Εισάγεται από / Geïmporteerd door /
Importowane przez / Importat de / Importerad av:

Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

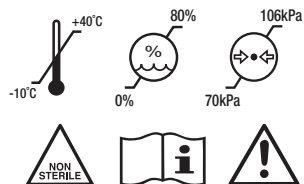

Utilizare prevăzută:

- Acest produs se utilizează pentru a fixa traductorul fetal, prin reglarea poziției cataramei pe centură.

Prezentare produs:

- Nume produs: Cureau abdominală pentru monitorizare fetală, re folosibilă .
- Alcătuire produs: Este realizat dintr-o curea elastică și o cataramă.

Interval produs:

- Se utilizează cu traductorul fetal în timpul monitorizării fetale la femeile gravide, pentru a fixa traductorul fetal.

Condiții de utilizare:

- Temperatură: 0°C ~ 40°C
- Umiditate relativă: 15% ~ 95%
- Presiune atmosferică: 70kpa ~ 106kpa

Ambalare și depozitare:

- Cureaua abdominală pentru monitorizare fetală este ambalată individual. Produsul ambalat trebuie depozitat într-o încăpere bine ventilată, fără gaze corozive.

Condiții mediu de depozitare:

- Temperatură: -10°C ~ +40°C
- Umiditate relativă: ≤80%
- Presiune atmosferică: 70kpa ~ 106kpa

Instalare/utilizare:

- Prindeți un capăt al curelei pe traductor, introducând butonul din partea de sus a traductorului într-una din găurile de pe curea.
- Menținând traductorul pe poziție, tensionați celălalt capăt al curelei și cuplați cureaua pe buton, asigurând un grad suficient de tensionare pentru a menține traductorul nemișcat, în contact cu

abdomenul.

- Evitați o strângere excesivă, care ar cauza un disconfort inutil pacientului.

Curățare produs:

- Spălați cureaua în apă caldă. Nu frecați marginea curelei pentru a evita desprinderea și nu o expuneți la radiații și la raze directe ale soarelui.

Perioadă de valabilitate:

- Perioadă de valabilitate: 2 ani.

Înlocuire și dezafectare:

- Înlocuire: În caz de fisurare, deteriorare a țesăturii elastice, depășire a termenului de valabilitate, schimbați cureaua de monitorizare fetală cu una nouă.
- Dezafectare: Curelele dezafectate pot fi aruncate la un loc cu deșeurile normale.

Contraindicații, precauții, avertismente și atenționări:

- Contraindicații: Nu fixați curelele pe o zonă lezionată.
- Întrerupeți utilizarea în caz de alergii la spandex.
- Atenționări: Citiți instrucțiunile înainte de a utiliza produsul.

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni

