



GIMA

PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

**TAVOLA SPINALE
PE STRETCHER
PLANCHE DORSALE
TABLA ESPINAL
PRANCHA DORSAL
WIRBELSÄULENBRETT
ΣΑΝΙΔΑ ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
DESKA ORTOPEDYCZNA
PÁTEŘNÍ DESKA
RYGGRADSBRÄDA
RANKALAUTA
SPINALNA NOSILA
CHRBTCOVÁ DOSKA
TARGĂ TIP PLACĂ SPINALĂ
IMMOBILISATIEPLANK
SPINALNA NOSILA
GERINCTÁBLA
SPINAL-BÅRE
ΓΡΨΒΗΑΥΗΑ ΟΠΟΡΑ
STUBURO LENTA
MUGURKAULA DĒĻIS
RYGGBÅRE**

لوح العمود الفقري

GIMA 56040 - 56044 - 56047 - 56528



JIANGSU RIXIN MEDICAL EQUIPMENT CO.,LTD.
No.427 Yangjin Road, Jinfeng, Zhangjiagang, Jiangsu
Province, CHINA
Made in China



YDC-7A1 - YDC-7B1 - YDC-7A4 - CB-01



SUNGO Europe B.V., Fascinatio Boulevard 522, Unit 1.7,
2909VA Capelle aan den IJssel, The Netherlands



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com



Denumire: TARGĂ TIP PLACĂ SPINALĂ

Model: YDC-7A1, YDC-7A4, YDC-7B1, CB-01

Utilizare prevăzută

Targa din PE se utilizează pentru transportul pacienților și persoanelor rănite, cu leziuni cervicale și lombare. Fixați centurile de siguranță pe targă, iar aceasta se poate folosi cu imobilizarea concomitentă a capului. Acesta este un dispozitiv reutilizabil, furnizat nesteril.

Componentă

Targa din PE este alcătuită din placa spinală și centurile de siguranță.

Material

Targa din PE este fabricată din polietilenă și nailon, material care este rezistent și ușor de utilizat.

Specificații:

Dimensiunile sunt următoarele:

Model	Specification	Load-bearing	Picture
YDC-7A1	184x45x6cm	181kg	
YDC-7A4	136x35x5cm	91kg	
YDC-7B1	185x46x5cm	227kg	
CB-01	60x41.5x8cm	159kg	

Depozitare

Depozitați această targă într-un loc rezistent la umezeală și într-un mediu necoroziv. Depozitare, transport, astfel cum se indică pe cutia de depozitare.

Curățare și întreținere

Curățenia trebuie să fie o rutină. Ștergeți cu soluție pe bază de alcool 75%. Verificați părțile de legătură și rotative ale tărgii. Verificați în mod regulat centurile de siguranță. Dacă sunt uzate sau prezintă fisuri, înlocuiți-le imediat.

Termen de valabilitate

8 ani

Durată

Mai puțin de 4 ore

Metoda de utilizare

1.Targa din PE poate transporta direct pacienții. 2. Pacientul este întins pe targă și prins cu centura de siguranță

Avertizare

Atunci când transportați persoane bolnave, asigurați-vă că ați strâns centura de siguranță pentru a garanta siguranța.

Toate incidentele grave legate de dispozitivul medical furnizat de noi trebuie raportate producătorului și autorității competente din statul membru în care se află sediul dumneavoastră.

Eliminare

Vă rugăm să eliminați produsul după utilizare pentru a respecta reglementările locale.

TERMENI DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția standard Gima de 12 luni B2B.