

seca 210

Deutsch	Seite 3
Englisch	Page 5
Français	Page 7
Español	Página 9
Italiano	Pagina 11
Dansk	Side 13
Svenska	Sida 15
Norsk	Side 17
Suomi	Sivu 19
Nederlands	Pagina 21
Português	Página 23
Ελληνικά	Σελίδα 25
日本語	ページ 27
Polski	Strona 29
Română	Pagina 31

Utilizarea prevăzută

Dispozitivul mecanic de măsurare a înălțimii bebelușului îi sprijină pe medici în luarea deciziilor de diagnosticare sau terapeutice bazate pe înălțimea sau creșterea pacientului.

Indicații de siguranță

⚠️ AVERTISMENT!

Vătămare corporală din cauza căderii

Aparatele de măsurare pentru sugari sunt amplasate de obicei pe suprafețe de lucru înalte. Dacă sugarul cade de pe suprafața de lucru, acesta poate suferi leziuni grave ireversibile sau mortale.

- ▶ Asigurați-vă că dispozitivul este stabil și plan în poziție verticală sau orizontală.
- ▶ Nu lăsați niciodată sugarul nesupravegheat.

Marcaje la dispozitiv și pe plăcuța de identificare


Text/ simbol	Explicație
UK CA xxxx	Dispozitivul este conform cu directivele din Regatul Unit xxxx: Organismul notificat pentru dispozitive medicale din Regatul Unit
 UK REP	Importator/reprezentant în Regatul Unit: seca Ltd 40 Barn Street B5 5QB Birmingham United Kingdom

Text/ simbol	Explicație
 CH REP	Importator/reprezentant în Elveția: seca ag (schweiz) Medizinische Waagen und Messsysteme Schönstatt Str. 2 CH-4153 REINACH
MD	Dispozitiv medical în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745

Operare

Procesul de măsurare:

1. Așezați bebelușul pe salteaua de măsurare. Capul bebelușului trebuie să se afle pe opritorul pentru cap (1) al saltelei de măsurare.
2. Cu mâna dreaptă, împingeți opritorul pentru picioare (2) în direcția picioarelor bebelușului. Cu mâna stângă țineți bebelușul.
3. Întindeți picioarele, apăsând ușor cu mâna stângă genunchii bebelușului spre saltea.

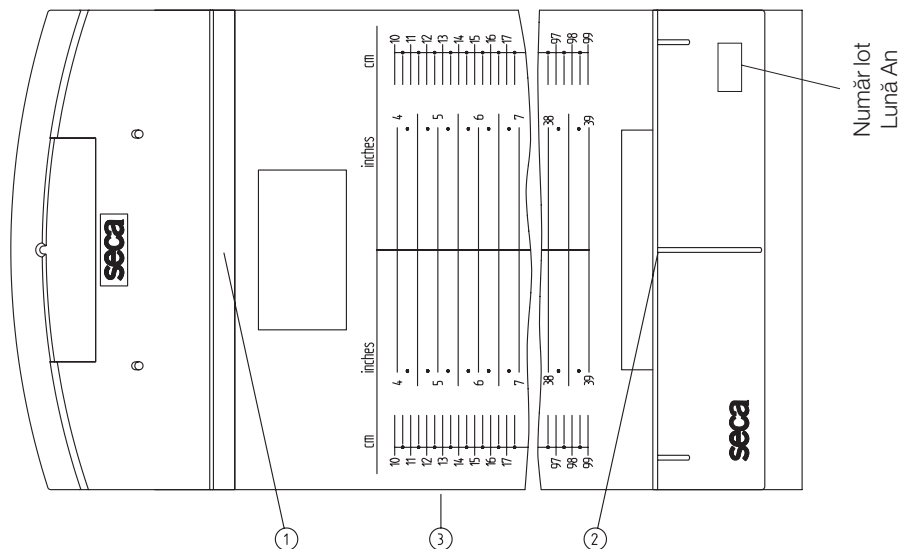

4. Cu mâna dreaptă, așezați opritorul pentru picioare (2) perpendicular pe tălpile picioarelor bebelușului.
5. Citiți lungimea corpului pe marcajul de pe salteaua de măsurare (3).

Dacă respectați pașii de mai sus, se obține o precizie mai bună de ± 5 mm.

Reprelucrare igienică

⚠️ AVERTISMENT!

Pericol de infecție

- Igienizați dispozitivul la intervale regulate.

⚠️ ATENȚIE!

Deteriorarea dispozitivului

- Utilizați numai dezinfectant pe bază de alcool (de ex. 70 % etanol).
- Respectați manualul de utilizare al dezinfectantului.
- Nu utilizați agenți de curățare agresivi sau abrazivi.
- Curățați dispozitivul:
 - Dacă este necesar, umeziți o cârpă moale cu soluție slabă de apă cu săpun și ștergeți dispozitivul cu aceasta.
- Dezinfectați dispozitivul:
 - Umeziți o cârpă moale cu dezinfectant și ștergeți dispozitivul cu aceasta.

Înainte și după fiecare măsurare	Când este necesar
• Suprafața saltelei de măsurare • Opritor pentru cap • Opritor pentru picioare	Toate celelalte piese ale saltelei de măsurare

Date tehnice

Interval de măsurare: 100 - 990 mm / 4 - 39 inch
 Diviziune: 5 mm / 1/4 inch
 Precizie: peste ± 5 mm

Dimensiuni (L x Î x A): 300 mm x 140 mm x 1340 mm

Greutate proprie: cca. 500 g

Interval de temperatură: +10 °C până la +40 °C

Dispozitiv medical în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/745: Clasa I, cu funcție de măsurare

Gestionarea sfârșitului ciclului de viață

Acest dispozitiv conține materii prime valoroase care pot fi reutilizate. Eliminați dispozitivul în conformitate cu legile locale și prevederile naționale.

Garanția

Pentru defecte atribuibile materialelor sau erorilor de fabricație se aplică o perioadă de garanție de doi ani de la livrare. Toate părțile mobile, cum ar fi baterii, cabluri, surse de alimentare, acumulatori etc., sunt excluse din această categorie. Defectele acoperite de garanție vor fi remediate gratuit pentru client la prezentarea chitanței de cumpărare. Nu pot fi luate în considerare alte pretenții. Costurile de transport dus-întors sunt suportate de client, în cazul în care dispozitivul se află într-o

altă locație decât sediul social al clientului. În cazul daunelor rezultate din transport, garanția poate fi solicitată numai dacă a fost utilizat pentru transport ambalajul original complet, iar dispozitivul a fost asigurat și fixat în ambalajul original. Prin urmare, păstrați toate părțile ambalajului.

Garanția se pierde dacă dispozitivul este deschis de către persoane care nu au fost autorizate în mod expres de către seca să facă acest lucru.

În cazul unei cereri de garanție, vă rugăm să contactați sucursala dumneavoastră seca sau distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

Declarație de conformitate



Prin prezenta, seca gmbh & co. kg declară că produsul este în conformitate cu prevederile directivelor și reglementărilor europene aplicabile. Declarația de conformitate completă poate fi găsită pe www.seca.com.

Medical Measuring Systems and Scales since 1840

seca gmbh & co. kg
Hammer Steindamm 3–25
22089 Hamburg
Germany

T +49 40 20 00 00 0
F +49 40 20 00 00 50
E info@seca.com

seca operates worldwide
with headquarters in
Germany and branches in:
seca france
seca united kingdom
seca north america
seca schweiz
seca zhong guo
seca nihon
seca mexico

seca austria
seca polska
seca middle east
seca suomi
seca américa latina
seca asia pacific
seca danmark
seca benelux
seca lietuva

and with exclusive
partners in more than
110 countries.

All contact data at
seca.com