

RO
Detergent concentrat pentru instrumente cu enzime proteolitice
PERICOL
Proprietăți GERMOCID ENZIMATICO este un detergent enzimatic proteolitic pentru curățarea și igienizarea instrumentelor medicale și dentare. Acționează eficient asupra reziduurilor organice, inclusiv a reziduurilor uscate, și asupra murdăriei persistente: poate fi utilizat pe sticlă, plastic și materiale metalice. Pentru UTILIZARE PROFESIONALĂ, indicat pentru spălare manuală și, de asemenea, pentru utilizare pe aparate cu ultrasunete.
Mod de utilizare: Diluați GERMOCID ENZIMATICO în proporție de 0,6-10% într-un litru de apă de la robinet, de preferință caldă, și amestecați bine. Înainte de a imersa instrumentele în soluția preparată, se recomandă decontaminarea acestora cu un produs specific, apoi clătirea cu apă rece și scufundarea lor în soluția GERMOCID ENZIMATICO timp de 10 minute. Dacă există reziduuri uscate sau murdărie persistentă, prelungiți timpul de imersie la 1 oră și folosiți o periuță, dacă este necesar.
Compoziție: Agenți tensioactivi neionici 15-30%; Agenți tensioactivi anionici 5-15%; Enzime; Parfum (Limonen, Citral), Conservant (Benzotiazolinonă).
Avertismente: H318 Provoacă leziuni oculare grave. H315 Provoacă iritarea pielii. EUH208 Conține: CITRAL Poate provoca o reacție alergică. P264 Spălați-vă bine pe mâini după utilizare. P280 Purtați mănuși de protecție / echipament de protecție a ochilor / echipament de protecție a feței. P305-P351-P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți. P310 Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ sau un medic. Conține: Alcool gras alcoilat polimer. Pentru uz profesional. A se păstra într-un loc răcoros și uscat, ferit de surse de căldură. După deschidere, dacă este păstrat corect, produsul își păstrează valabilitatea menționată pe etichetă.
Detergent în conformitate cu Regulamentul CE nr. 648/2004
Valabilitate: 3 ani
Lotul și data expirării: a se vedea ambalajul
DISPOZITIV MEDICAL CE

Producător:

GERMO S.p.A. - Via Giotto 19/21 - 20032 Cormano (MI) Tel. 02 663 01 938

www.germo.it - info@germodis.com

MADE IN ITALY