



DESCRIERE

Centuri posturale realizate din material textil hidrofug și ignifug, clasă 1, cu căptușeală din poliuretan expandat ignifug, clasă 1 IM, și chingi din polipropilenă. Sunt disponibile în mai multe variante: cu închidere simplă, cu închidere de siguranță sau cu chingi prevăzute cu ocheti.

DESTINAȚIE DE UTILIZARE

Centurile posturale sunt destinate menținerii posturii pacienților adulți necooperanți, aflați în scaune rulante, scaune tip comodă, precum și pentru prevenirea căderilor.

INDICAȚII ȘI PRECAUȚII DE UTILIZARE

Dispozitivul trebuie poziționat cu o tensiune adecvată pentru a permite funcționarea corectă. La reglarea chingilor, între pacient și dispozitiv trebuie să poată încăpea o mână întinsă. NU utilizați centurile cu chingă prevăzută cu ocheti la pacienții foarte agitați. Se recomandă monitorizarea periodică a pacientului și a zonei corpului aflate în contact cu centura. Utilizați întotdeauna dispozitivul peste un articol de îmbrăcăminte care să protejeze persoana.

CONTRAINDICAȚII

Nu au fost identificate contraindicații, cu excepția cazurilor de sensibilitate cunoscută la materialele componente.

COMPOZIȚIE

MATERIAL EXTERIOR: Poliamidă + rășină poliuretanică ignifugă. Ignifug, clasă 1

CĂPTUȘEALĂ: Poliuretan expandat ignifug, clasă 1 IM

INSTRUCȚIUNI DE SPĂLARE

SPĂLARE MAX. 40°C	A NU SE FOLOSI ÎNĂLBITOR	NU CĂLCAȚI	A NU SE FOLOSI USCĂTORUL DE RUFE
	FOLOȘIȚI ORICE SOLVENT, CU EXCEPȚIA TETRACLORETELENEI.		

Atenție: acolo unde sunt prevăzute, îndepărtați cheile și mecanismele de blocare înainte de spălare. Contactul acestora cu lichidele le poate afecta funcționalitatea. Producătorul nu își asumă răspunderea pentru eventualele modificări ale caracteristicilor tehnice ale dispozitivului în cazul nerespectării instrucțiunilor de spălare.

DEZINFECTARE

Utilizați produse dezinfectante autorizate pentru uz medico-chirurgical.

DEPOZITARE

Depozitați produsul ferit de lumină, surse de căldură și umiditate.

ELIMINARE

Eliminați dispozitivul în conformitate cu reglementările în vigoare privind protecția mediului și colectarea selectivă a deșeurilor.

	Cod produs		Dispozitiv medical
	Număr de lot		Producător
	Dispozitiv medical conform cu Regulamentul (UE) 2017/745		Citiți instrucțiunile de utilizare
	A se păstra ferit de lumina soarelui.		A se păstra într-un loc răcoros și uscat.
	Data fabricației		Nu conține latex din cauciuc natural.
	Reprezentant autorizat în Elveția		Distribuit de
	Identificator unic al dispozitivului		

NU îndepărtați eticheta de pe dispozitivul medical, deoarece aceasta asigură trasabilitatea produsului furnizat (producător, UDI, număr de lot și codul produsului).

CONDIȚII DE GARANȚIE GIMA

Se aplică garanția B2B standard Gima, de 12 luni.

GIMA 43175 - 43176 - 43177



Erregi S.a.s.
Via Adua 40
21040 Vedano Olona (Va)
commerciale@erregiausilimedici.it
www.erregiausilimedici.it
MADE IN ITALY



21/26/S - 20/26/S- 19/26/S



Gima S.p.A.
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
Made in Italy



Élite Med Group Sagl
Via Luigi Lavizzari 4
6850 Mendrisio
Switzerland

M43175-Rev.6-07.26



ROMÂNĂ

CENTURI POSTURALE

ATENȚIONĂRI

Înainte de a efectua orice operațiune, verificați vizual integritatea dispozitivului.

Dacă produsul prezintă anomalii, contactați imediat punctul de vânzare de la care a fost achiziționat. Erregi sas nu își asumă nicio responsabilitate pentru utilizarea necorespunzătoare a dispozitivului. În cazul unui incident grav survenit în legătură cu utilizarea dispozitivului, vă rugăm să îl raportați producătorului și autorității competente din statul membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.