




ROMÂNĂ

Gulerul elisabetan Contec este realizat din plastic rezistent, oferind protecție animalului dvs. de companie pe parcursul recuperării. Designul său trainic ajută la prevenirea zgârieturilor, mușcăturilor sau rosului, garantând siguranța procesului de vindecare.

Cum se utilizează

1.

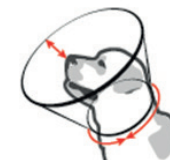


Măsurați circumferința gâtului animalului de companie și alegeți inelul elisabetan potrivit, pe baza tabelului de mărimi. Asigurați-vă că, după aplicare, nasul animalului de companie nu trece dincolo de marginea cercului, pentru a preveni eficient rănille cauzate de mușcături și de lins.

2.

Aranjați cu grijă gulerul în jurul gâtului animalului de companie, orientându-l în direcția corectă (cu partea mai lată în față), asigurându-vă că nu afectează respirația sau alimentarea animalului de companie.


3. F

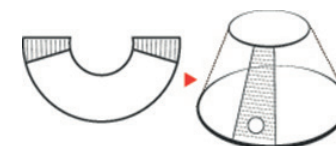

după ce ați reglat gulerul la strânsoarea potrivită, fixați foarte bine banda tip scai. După aplicare, asigurați-vă că animalul de companie se poate mișca liber, dar fără a-și putea scoate gulerul și fără a se elibera cu ușurință.

4. Când îl poartă pentru prima dată, animalele de companie pot avea reacții de disconfort. Lăsați-i animalului de companie timpul necesar pentru a se obișnui, observând mișcările acestuia pentru a vă asigura că purtarea colierului nu îi afectează activitățile zilnice.

Curățarea gulerului elisabetan din PVC: Ștergeți cu apă și săpun delicat, clătiți cu o lavetă umezită și uscați la umbră. Nu îl lăsați la înmuiat, nu folosiți substanțe chimice agresive și nu îl expuneți la soare.

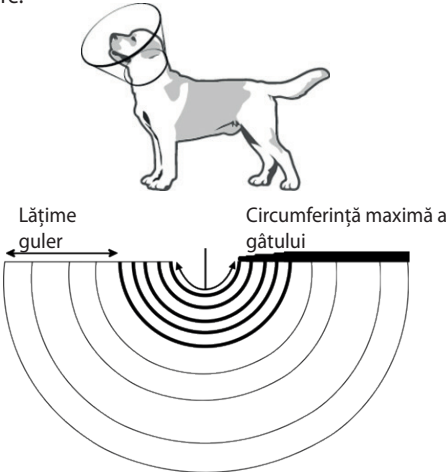

Măsurați acasă cu o riglă

Specificații	Potrivit pentru gât	adâncime	Greutate recomandată
Foarte mare	49-56 cm*	28 cm	Până la 40 kg
Nr. 1	43-50 cm*	22 cm	Până la 30 kg
Nr. 2	41-48 cm*	20,5 cm	Până la 15 kg
No.3	36-42 cm*	18 cm	Până la 10 kg
Nr. 4	31-36 cm*	13,5 cm	Până la 7,5 kg
Nr. 5	26-29 cm	13 cm	Până la 5 kg
Nr. 6	19-23 cm*	11 cm	Până la 4 kg
No.7	17-20 cm*	9 cm	Până la 3 kg

Cum se curăță
Curățarea gulerului elisabetan din PVC: Ștergeți cu apă și săpun delicat, clătiți cu o lavetă umezită și uscați la umbră. Nu îl lăsați la înmuiat, nu folosiți substanțe chimice agresive și nu îl expuneți la soare.

REF	VET0007
	VET0006
	VET0005
	VET0004
	VET0003
	VET0002
	VET0001



Contec Medical Systems Co.,Ltd.
Address: No.112 Qinhuang West Street,
Economic & Technical Development Zone, Qinhuangdao, Hebei Province
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA
Tel: +86-335-8015430
Fax: +86-335-8015588
E-mail: cms@contecmed.com.cn
Website: <http://www.contecmed.com>
Made in China