



MOPEDIA®

ROMÂNĂ

MA R1900_R1905 02 A* RO_02-2023

**DISPOZITIV PENTRU RIDICAREA
ȘI TRANSFERUL PERSOANELOR
MUEVO HOME - MUEVO HOME LIGHT**

MANUAL DE INSTRUȚIUNI

CUPRINS

1. CODURI	PAG.3
2. INTRODUCERE	PAG.3
3. DESTINAȚIA DE UTILIZARE	PAG.3
4. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE	PAG.3
5. AVERTISMENTE GENERALE	PAG.4
6. SIMBOLURI UTILIZATE	PAG.4
7. DESCRIERE GENERALĂ	PAG.5
7.1 Descrierea componentelor RI900	pag. 5
7.2 Descrierea componentelor RI905	pag. 6
7.3 Descrierea componentelor accesoriului RIA910	pag. 7
8. INSTRUCȚIUNI DE MONTAJ	PAG.7
8.1 Instrucțiuni de montaj RI900 și RI905	pag. 7
8.2 Instrucțiuni de montaj accesoriu RIA910	pag. 8
8.3 Instrucțiuni de montaj pentru hamuri	pag. 8
9. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE	PAG.9
9.1 Instrucțiuni de utilizare elevator RI900 și RI905	pag. 9
9.1.1 Instrucțiuni specifice RI900 deschidere/închidere picioare	pag. 10
9.1.2 Instrucțiuni specifice RI905 deschidere/închidere picioare	pag. 10
9.2 Instrucțiuni de utilizare elevator RI900 și RI905 cu braț de ridicare RIA910	pag. 11
9.3 Detalii funcționale	pag. 11
9.4 Instrucțiuni de utilizare a telecomenzii	pag. 12
9.4.1 Telecomandă RI900	pag. 12
9.4.2 Telecomandă RI905	pag. 13
10. AVERTISMENTE	PAG.13
11. CURĂȚARE ȘI IGIENIZARE	PAG.13
12. ÎNTREȚINERE	PAG.14
13. PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII	PAG.14
14. CARACTERISTICI TEHNICE	PAG.14
15. CONDIȚII DE ELIMINARE	PAG.16
15.1 Avertismente pentru eliminarea corectă a produsului conform directivei europene 2012/19/UE	pag. 16
15.2 Tratarea bateriilor uzate (directiva 2006/66/CE)	pag. 16
16. GARANȚIE	PAG.16
16.1 Garanția bateriilor reîncărcabile	pag. 16
16.2 Reparații	pag. 17
16.3 Piese de schimb	pag. 17
16.4 Clauze de exonerare	pag. 17

CE Dispozitiv medical de clasa I

REGULAMENTUL (UE) 2017/745 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 5 aprilie 2017 privind dispozitivele medicale

1. CODURI

RI900 - Elevator electric Muevo Home, capacitate 180 Kg

RI905 - Elevator electric Muevo Home Light, capacitate 135 Kg

2. INTRODUCERE

Vă mulțumim că ați ales un dispozitiv pentru ridicarea și transferul persoanelor din gama **MUEVO HOME by MOPEDIA** al MORETTI S.p.A. Designul și calitatea acestora garantează confort maxim, siguranță maximă și fiabilitate. Elevatoarele **MUEVO HOME by MOPEDIA** ale MORETTI S.p.A. au fost proiectate și realizate pentru a răspunde tuturor cerințelor dumneavoastră privind o utilizare practică și corectă. Acest manual conține sugestii pentru folosirea corectă a dispozitivului ales și sfaturi valoroase pentru siguranța dumneavoastră. Vă recomandăm să citiți cu atenție întregul manual înainte de a utiliza elevatorul. În caz de nelămuriri, vă rugăm să contactați distribuitorul, care vă va putea ajuta și consilia corespunzător.

3. DESTINAȚIA DE UTILIZARE

Elevatoarele din gama **MUEVO HOME by MOPEDIA** sunt destinate ridicării și transferului persoanelor cu dificultăți de mobilitate, cu ajutorul unui însoțitor care acționează comenzile. Nu pot fi utilizate de o singură persoană. MORETTI S.p.A. își declină orice responsabilitate pentru daunele provocate de o utilizare improprie a dispozitivului sau de o utilizare diferită de cea indicată în prezentul manual.

4. DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

MORETTI SpA declară pe proprie răspundere că produsele fabricate și introduse pe piață de MORETTI SpA și care fac parte din familia ELEVATOARE PENTRU PACIENȚI MUEVO HOME sunt conforme cu dispozițiile aplicabile ale regulamentului 2017/745 privind DISPOZITIVELE MEDICALE din 5 aprilie 2017. În acest scop, MORETTI SpA garantează și declară pe proprie răspundere următoarele:

1. Dispozitivele în cauză îndeplinesc cerințele generale de siguranță și performanță prevăzute de anexa I la regulamentul 2017/745, conform anexei IV la regulamentul menționat.
2. Dispozitivele în cauză NU SUNT INSTRUMENTE DE MĂSURARE.
3. Dispozitivele în cauză NU SUNT DESTINATE INVESTIGAȚIILOR CLINICE.
4. Dispozitivele în cauză sunt comercializate în ambalaj NESTERIL.
5. Dispozitivele în cauză se încadrează în clasa I, în conformitate cu prevederile anexei VIII la regulamentul menționat.
6. MORETTI SpA păstrează și pune la dispoziția Autorităților Competente, timp de cel puțin 10 ani de la data fabricării ultimului lot, documentația tehnică ce atestă conformitatea cu regulamentul 2017/745.

Notă: Codurile complete de produs, codul de înregistrare al Fabricantului (SRN), codul UDI-DI de bază și eventualele referiri la standardele utilizate sunt indicate în Declarația de Conformitate UE pe care MORETTI SPA o emite și o pune la dispoziție prin canalele proprii.

5. AVERTISMENTE GENERALE



ATENȚIE!

Acordați întotdeauna o atenție deosebită pieselor în mișcare, care ar putea provoca prinderea membrelor și leziuni corporale.

- Pentru o utilizare corectă a dispozitivului consultați prezentul manual, acordând o atenție deosebită întreținerii și avertismentelor înainte de fiecare utilizare.
- Pentru o utilizare corectă a dispozitivului consultați medicul sau terapeutul dumneavoastră.
- Păstrați produsul ambalat departe de orice sursă de căldură, deoarece ambalajul este din carton.
- Durata de viață a accesoriului este determinată de uzura pieselor nereparabile și/sau neînlocuibile.
- Acordați întotdeauna atenție prezenței copiilor.
- Nu depășiți capacitatea maximă admisă.
- Utilizatorul și/sau pacientul va trebui să semnaleze orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul fabricantului și autorității competente a statului membru în care este stabilit utilizatorul și/sau pacientul.

6. SIMBOLURI UTILIZATE



Cod produs



Identificator unic al dispozitivului



Marcaj CE



Fabricant



Lot de producție



Citiți manualul de instrucțiuni



Dispozitiv Medical



Condiții de eliminare



Atenție



Data fabricației



Eliminarea produsului conform directivei CE/19/2012

IP54

Protecție împotriva prafului și a stropilor de apă




Parte aplicată de tip B



Greutate maximă suportată

7. DESCRIERE GENERALĂ



7.1 Descrierea componentelor RI900

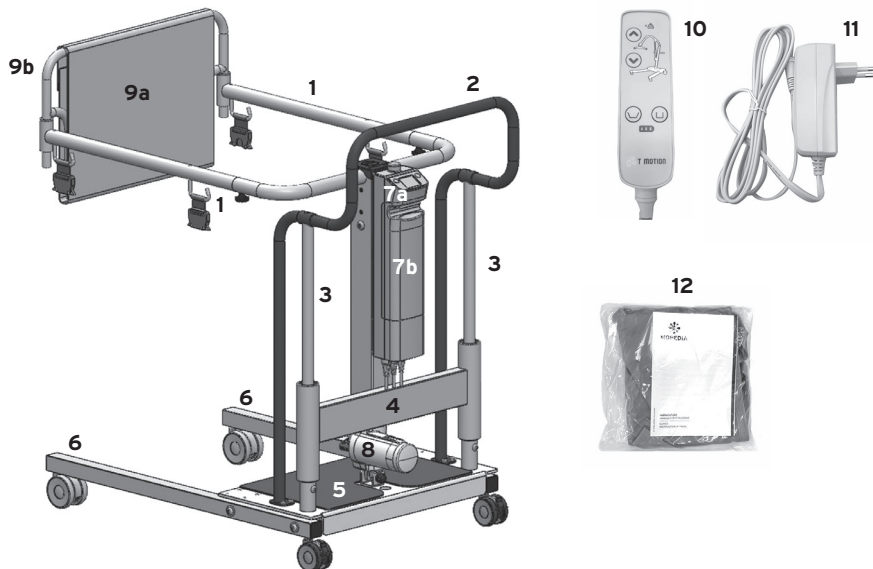

Imagini cu titlu ilustrativ

1. n.2 Brațe detașabile prevăzute cu puncte de prindere pentru ham, cu rozetă de blocare
2. n.1 Mâner de împingere
3. n.2 Coloane de glisare pentru ridicare
4. n.1 Corp central (grupuri de glisare cu rulmenți, grindă de susținere, coloană de susținere, semi-brațe pentru sprijinul pacientului)
5. n.1 Bază prevăzută cu:
 - n.1 Covoaraș (partea superioară a bazei)
 - n.1 A cincea roată $\varnothing$ 65 mm (partea inferioară a bazei)
 - n.2 Actuatori pentru deschiderea-închiderea picioarelor (partea inferioară a bazei)
 - n.4 Grupuri de glisare pentru deschiderea-închiderea picioarelor (partea inferioară a bazei)
6. n.2 Picioare prevăzute cu:
 - n.2 roți $\varnothing$ 75 mm fără frână (partea anterioară)
 - n.2 roți $\varnothing$ 65 mm cu frână (partea posterioară)
7. n.1 Unitate de comandă (7a) cu baterie detașabilă (7b)
8. n.1 Actuator de ridicare
9. n.1 spătar (9a) cu n.1 capitonaj spătar (9b)
10. n.1 Telecomandă
11. n.1 Încărcător de baterie
12. n.1 Ham/scaun standard RIA201 complet cu chingi cu cataramă și pasant pentru reglarea înălțimii


7.2 Descrierea componentelor RI905

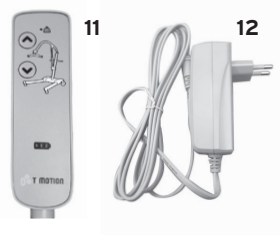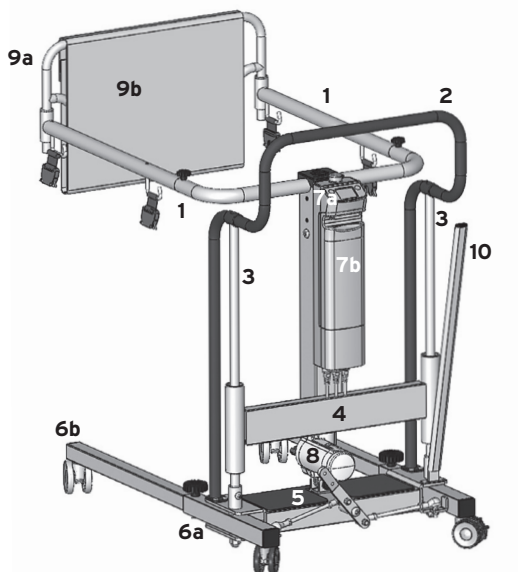

Imagini cu titlu ilustrativ

1. n.2 Brațe detașabile prevăzute cu puncte de prindere pentru ham, cu rozetă de blocare
2. n.1 Mâner de împingere
3. n.2 Coloane de glisare pentru ridicare
4. n.1 Corp central (grupuri de glisare cu rulmenți, grindă de susținere, coloană de susținere, semi-brațe pentru sprijinul pacientului)
5. n.1 Bază prevăzută cu:
 - covoraș antiderapant
 - suport pentru manetă
 - selector rotativ cu 2 tiranți pentru deschiderea picioarelor
6. n.2 Picioare prevăzute cu:
 - parte fixă (6a) cu roți $\varnothing$ 65 mm cu frână, fixată de bază prin articulație
 - parte demontabilă (6b) cu rozetă de blocare și roți $\varnothing$ 75 mm
7. n.1 Unitate de comandă (7a) cu baterie detașabilă (7b)
8. n.1 Actuator de ridicare
9. n.1 Spătar (9a) cu n.1 capitonaj spătar (9b)
10. n.1 Manetă de acționare din oțel pentru deschiderea picioarelor
11. n.1 Telecomandă
12. n.1 Încărcător de baterie
13. n.1 Ham/scaun standard RIA201 complet cu chingi cu cataramă și pasant pentru reglarea înălțimii

7.3 Descrierea componentelor accesoriului RIA910

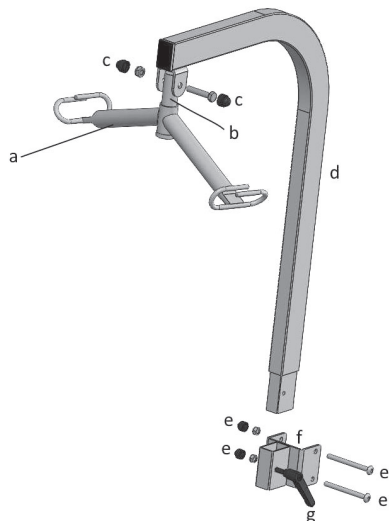

- a. traversă cu 4 cârlige
- b. bolț de susținere a traversei
- c. șurub pentru bolțul b. cu piuliță și capace de protecție
- d. braț de ridicare
- e. șuruburi cu piuliță și capac pentru montarea accesoriului RIA910 pe coloana centrală RI900-RI905
- f. placă pentru montarea accesoriului RIA910 pe coloana centrală RI900-RI905
- g. mâner de strângere a brațului de ridicare

Imagine cu titlu ilustrativ

8. INSTRUȚIUNI DE MONTAJ

8.1 Instrucțiuni de montaj RI900 și RI905

1. Deschideți cutia de ambalaj și verificați dacă conținutul corespunde cu cel indicat în manual și dacă piesele nu au suferit deteriorări în timpul transportului. În caz contrar, contactați imediat distribuitorul dumneavoastră.
2. Luați brațele de susținere a pacientului cu rozetele aferente (fig. a); dacă cârligele brațului orizontal nu sunt prevăzute cu partea mamă a cataramei, montați pe cârlige cataramele mamă dotate cu chingă cu fantă, prin fanta prevăzută, conform fig. a1.
3. Introduceți brațele de susținere a pacientului prevăzute cu cataramă mamă (așa cum se descrie la punctul 2) pe partea fixă a mânerului de susținere (fig. b). Strângeți rozetele de blocare pentru a fixa brațele (fig. c).
4. Introduceți spătarul în bușele verticale aflate în partea terminală a brațelor, împingându-l în jos până la capăt (fig. d). Montați capitonajul pe spătar: înfășurați spătarul și închideți capitonajul cu banda velcro (fig. e).

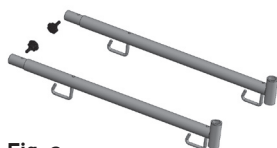


Fig. a

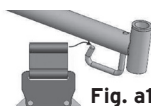


Fig. a1

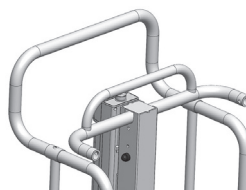


Fig. b



Fig. c

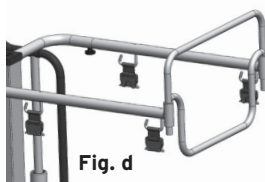


Fig. d

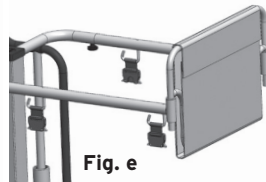


Fig. e

5. Instalați bateria în locașul special al unității de comandă (fig. f).



Imagini cu titlu ilustrativ

Fig. f

Dispozitivul este pregătit pentru utilizare.

8.2 Instrucțiuni de montaj accesoriu RIA910



1. Deschideți cutia de ambalaj și verificați dacă conținutul corespunde cu cel indicat în manual și dacă piesele nu au suferit deteriorări în timpul transportului. În caz contrar, contactați imediat distribuitorul dumneavoastră.
2. Îndepărtați capacele de pe orificiile coloanei centrale și montați acolo placa (ref. f) cu ajutorul șuruburilor aferente (ref. e)
3. Asamblați brațul de ridicare (ref. a, b, c)
4. Montați brațul de ridicare în locașul special din placă și strângeți cu ajutorul mânerului de strângere (ref. g) Accesoriul este pregătit pentru utilizare.

Imagine cu titlu ilustrativ

Notă: pentru o utilizare optimă a accesoriului braț de ridicare RIA910 se recomandă demontarea semi-brațelor de ridicare (ref. 1) ale RI900 sau RI905, prin deșurubarea rozetelor de strângere și extragerea acestora; acest lucru va permite operatorilor o gestionare mai bună a persoanei ridicate, atât pentru operațiunile de efectuat asupra acesteia, cât și pentru deplasarea ei.

8.3 Instrucțiuni de montaj pentru hamuri

Hamurile RIA201 și RIA211 din gama MOPEDIA by Moretti sunt adecvate pentru utilizarea cu dispozitivul de transfer și ridicare a persoanelor Muevo Home RI900 și RI905.

Hamurile RIA201 și RIA211 sunt prevăzute cu 4 puncte de prindere (2 pe fiecare parte), cu înălțimi reglabile prin cataramă și pasanți care, glisând pe chingi, permit obținerea unor poziții diferite de reglare a poziției și a înălțimii față de sol a persoanei aflate în ham/scaun. Dacă cârligele brațelor orizontale ale dispozitivului RI900 sau RI905 nu sunt prevăzute cu partea mamă a cataramei sau dacă este necesară înlocuirea acesteia, montați pe cârlige cataramele mamă dotate cu chingă cu fantă, prin fanta prevăzută, conform figurii de mai jos (Fig. i).

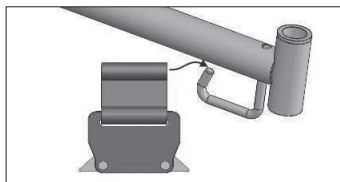


Fig. i

Imagini cu titlu ilustrativ

Prindeți punctele de agățare ale hamurilor (catarama “tată”) de cataramele “mamă” corespunzătoare de pe brațul orizontal, respectând următoarele asocieri: **a cu A, b cu B, c cu C, d cu D** (Fig. ii, iii, iv, v, vi)



Fig. ii

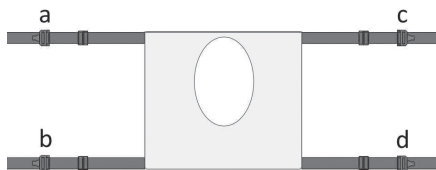


Fig. iii

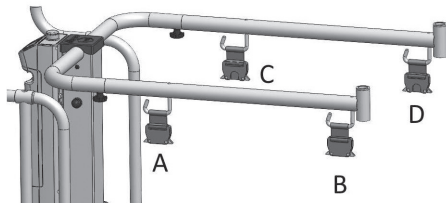


Fig. iv

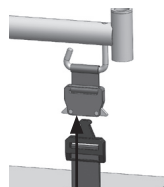


Fig. v

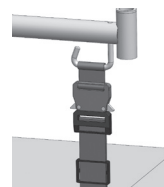


Fig. vi

Imagini cu titlu ilustrativ



ATENȚIE!

Confirmarea montării corecte a cataramelor hamurilor este “clicul” din momentul introducerii cataramei tată în cea mamă. Verificați și manual, trăgând chingile în jos, ca toate cataramele să fie corect montate.



ATENȚIE!

Nu deplasați pacientul fără ca spătarul să fie montat pe dispozitivul RI900 sau RI905! Înainte de a deplasa persoana, aveți întotdeauna grijă să verificați montarea corectă a scaunului, controlând prinderea corectă a cataramelor, precum și a spătarului, verificând glisarea completă a tubului inferior în bușca terminală a brațului.

9. INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE



ATENȚIE!

LA PRIMA UTILIZARE SE RECOMANDĂ ÎNCĂRCAREA BATERIILOR TIMP DE CIRCA 6/8 ORE. ULTERIOR, ASIGURAȚI-VĂ CĂ BATERIA ESTE ÎNCĂRCATĂ ÎNAINTE DE FIECĂRE UTILIZARE.

9.1 Instrucțiuni de utilizare elevator RI900 și RI905

1. Scoateți spătarul extrăgându-l din bușele verticale ale brațelor, împingându-l în sus.
2. Aproiați-vă de persoana care trebuie ridicată și poziționați elevatorul cât mai aproape posibil de aceasta, deschizând, dacă este necesar, picioarele dispozitivului în măsura necesară.
3. Înainte de ridicare, blocați frânele roților posterioare.
4. Mențineți persoana centrată între picioarele bazei și mereu orientată către cel care o asistă
5. Prindeți cu atenție punctele de agățare ale hamului de cârligele de pe brațele de ridicare (a se vedea par. 8.3). Confirmarea montării corecte a cataramelor hamurilor este “clicul” din momentul introducerii cataramei tată în cea mamă. Verificați și manual, trăgând chingile în jos, ca toate cataramele să fie corect montate.
6. Montați spătarul demontat, având grijă să glisați tuburile inferioare complet, până la capăt, în bușele brațelor orizontale.

7. Acționați actuatorul de ridicare a pacientului cu ajutorul tastei “▲” de pe unitatea de comandă sau de pe telecomandă, ridicând pacientul la înălțimea necesară și menținându-l în poziție frontală față de cel care îl asistă.
8. Deblocați roțile posterioare și transferați pacientul.
9. Înainte de a începe coborârea persoanei aflate în ham, blocați din nou roțile posterioare
10. Acționați actuatorul de coborâre a pacientului cu ajutorul tastei “▼” de pe unitatea de comandă sau de pe telecomandă, coborând pacientul până la înălțimea necesară.

NOTĂ: În timpul funcționării normale a elevatorului, picioarele acestuia pot fi deschise sau închise electric cu ajutorul tastelor dedicate de pe unitatea de comandă și de pe telecomandă. Operațiunea de deschidere sau închidere a picioarelor poate fi efectuată atât cu pacientul aflat în ham, cât și în gol.



ATENȚIE!

VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA POZIȚIA CORECTĂ DE ȘEZUT A PERSOANEI RIDICATE PE TOATĂ DURATA MIȘCĂRII!

În timpul coborârii, evitați ca pacientul să întâlnească un obstacol care să împiedice deplasarea acestuia în jos. În acest caz, ridicați din nou pacientul și îndepărtați cauza care împiedică coborârea.

9.1.1 Instrucțiuni specifice pentru RI900 Deschidere/Închidere picioare




Pentru a deschide sau a închide picioarele, acționați actuatorii de deschidere a picioarelor cu ajutorul tastelor aflate în partea de jos a telecomenzii. Picioarele pot fi deschise și închise și cu pacientul aflat în ham.

9.1.2 Instrucțiuni specifice pentru RI905 Deschidere/Închidere picioare



Pentru a deschide sau a închide manual picioarele, scoateți maneta aflată eventual în suportul pentru manetă al bazei, introduceți maneta în selectorul central și rotiți-o manual în sens orar (deschidere) și antiorar (închidere); după utilizare, maneta poate fi scoasă din nou și reintrodusă în suport. Picioarele pot fi deschise și închise și cu pacientul aflat în ham.

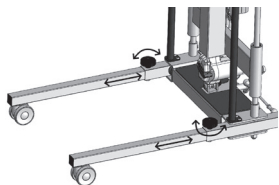

Demontarea/Montarea picioarelor

Deșurubați și scoateți rozeta pasantă care unește partea fixă de partea demontabilă a picioarelor; îndepărtați partea demontabilă a piciorului. Pentru a reface montajul, poziționați piciorul și introduceți rozeta cu tijă pasantă în orificiul special, înșurubând-o din nou.

9.2 Instrucțiuni de utilizare elevator RI900 și RI905 cu braț de ridicare RIA910

1. Scoateți spătarul extrăgându-l din bușele verticale ale brațelor. Pentru utilizarea cu accesoriul RIA910 se recomandă demontarea brațelor orizontale de ridicare, prin deșurubarea rozetelor de blocare și extragerea acestora.
2. Apropiati-vă de persoana care trebuie ridicată și poziționați elevatorul cât mai aproape posibil de aceasta, deschizând, dacă este necesar, picioarele dispozitivului în măsura necesară
3. Înainte de ridicare, blocați frânele roților posterioare
4. Mențineți persoana centrată între picioarele bazei și mereu orientată către cel care o asistă
5. Prindeți cu atenție punctele de agățare ale hamului de cârligele traversei de ridicare
6. Acționați actuatorul de ridicare a pacientului cu ajutorul tastei “▲” de pe unitatea de comandă sau de pe telecomandă, ridicând pacientul la înălțimea necesară
7. Deblocați roțile posterioare și transferați pacientul
8. Înainte de a începe coborârea persoanei aflate în ham, blocați din nou roțile posterioare
9. Acționați actuatorul de coborâre a pacientului cu ajutorul tastei “▼” de pe unitatea de comandă sau de pe telecomandă, coborând pacientul până la înălțimea necesară.

NOTĂ: În timpul funcționării normale a elevatorului, picioarele acestuia pot fi deschise sau închise electric cu ajutorul tastelor dedicate de pe unitatea de comandă și de pe telecomandă. Operațiunea de deschidere sau închidere a picioarelor poate fi efectuată atât cu pacientul aflat în ham, cât și în gol.



ATENȚIE!

VERIFICAȚI ÎNTOTDEAUNA POZIȚIA CORECTĂ DE ȘEZUT A PERSOANEI RIDICATE PE TOATĂ DURATA MIȘCĂRII!

În timpul coborârii, evitați ca pacientul să întâlnească un obstacol care să împiedice deplasarea acestuia în jos. În acest caz, ridicați din nou pacientul și îndepărtați cauza care împiedică coborârea.

9.3 Detalii funcționale

FUNCȚIE AUTOMATĂ ANTI-STRIVIRE

Kitul electric include o funcție automată anti-strivire a pacientului, care blochează coborârea brațului de ridicare în cazul contactului accidental între pacient și un obstacol.

OPRIRE DE URGENȚĂ

Pe unitatea de comandă se află un buton roșu “STOP” (ref. 1) care, dacă este apăsat, dezactivează imediat toate comenzile. Pentru restabilirea funcționării, rotiți în sens orar butonul roșu până când acesta sare în sus și revine în poziția de repaus.



COMENZI DE URGENȚĂ

Pentru RI900. Pe unitatea de comandă se află patru butoane (două pentru urcare/coborâre și două pentru deschiderea/închiderea picioarelor) care pot fi utilizate în locul celor de pe telecomandă, pentru a efectua operațiuni în cazul în care telecomanda prezintă probleme de funcționare, și anume:

Tasta 1: buton de urgență tip ciupercă, de culoare roșie

Tasta 3: tastă “up” pentru ridicare

Tasta 4: tastă pentru deschiderea picioarelor

Tasta 5: tastă pentru închiderea picioarelor

Tasta 6: tastă “down” pentru coborâre

Imagine cu titlu ilustrativ



COMENZI DE URGENȚĂ

Pentru RI905. Pe unitatea de comandă se află două butoane care pot fi utilizate în locul celor de pe telecomandă, pentru a efectua operațiuni


în cazul în care telecomanda prezintă probleme de funcționare, și anume:

Tasta 1: buton de urgență tip ciupercă, de culoare roșie

Tasta 2: tastă “up” pentru ridicare

Tasta 3: tastă “down” pentru coborâre

Imagine cu titlu ilustrativ

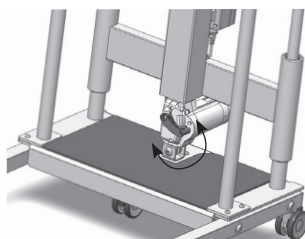

COBORÂREA MECANICĂ MANUALĂ A ACTUATORULUI

În cazul utilizării coborârii manuale/mechanice, asigurați-vă că aceasta se efectuează în condiții de siguranță totală pentru pacient. Pentru a activa coborârea manuală/mechanică, trageți în sus maneta roșie aflată în partea de jos a actuatorului și însoțiți în siguranță coborârea dispozitivului. După încheierea coborârii, readuceți maneta roșie în poziția de repaus.

INDICAREA STĂRII DE ÎNCĂRCARE A BATERIEI

Există un indicator cu 3 leduri pentru starea de încărcare a bateriei. Acest indicator este situat atât pe unitatea de comandă (doar pentru RI900, ref. 2 în fotografia de mai sus “RI900”), cât și pe telecomandă (ref. 6 în fotografia de la par. 9.4.1 și ref. 4 la par. 9.4.2). Trei leduri aprinse indică încărcarea completă a bateriei, iar un singur led aprins indică faptul că bateria este descărcată și trebuie reîncărcată.

CUM SE REÎNCARCĂ BATERIILE

- Conectați adaptorul la priza de rețea și apoi la intrarea unității de comandă, după ce ați scos capacul de protecție aferent
- Pe adaptorul încărcătorului există un led care, în faza de încărcare, are culoarea portocalie. Încărcați bateria până când ledul devine verde
- Înainte de a utiliza elevatorul, nu uitați să deconectați întotdeauna adaptorul de încărcare a bateriilor!
- Încărcați bateriile timp de cel puțin 6 ore înainte de a utiliza elevatorul

9.4 Instrucțiuni de utilizare a telecomenzii

9.4.1 Telecomandă RI900

Telecomanda este conectată la unitatea de comandă printr-un cablu spiralat extensibil.



Tastele telecomenzii:

1. buton “up” pentru ridicare
2. buton “down” pentru coborâre
3. buton pentru deschiderea picioarelor
4. buton pentru închiderea picioarelor

Semnalizări pe telecomandă:

5. led pentru indicarea suprasarcinii: elevatorul dispune de un dispozitiv de control al suprasarcinii care întrerupe mișcarea dacă este depășit pragul de sarcină excesivă și generează un semnal atât vizual, cât și acustic
6. led pentru semnalizarea stării de încărcare a bateriei

Imagine cu titlu ilustrativ

9.4.2 Telecomandă RI905

Telecomanda este conectată la unitatea de comandă printr-un cablu spiralat extensibil.



Tastele telecomenzii:

1. buton "up" pentru ridicare
2. buton "down" pentru coborâre

Semnalizări pe telecomandă:

3. led pentru indicarea suprasarcinii: elevatorul dispune de un dispozitiv de control al suprasarcinii care întrerupe mișcarea dacă este depășit pragul de sarcină excesivă și generează un semnal atât vizual, cât și acustic
4. led pentru semnalizarea stării de încărcare a bateriei

Imagine cu titlu ilustrativ

10. AVERTISMENTE

- Elevatorul este un dispozitiv care permite efectuarea unor transferuri scurte ale unui pacient cu dificultăți de mișcare, de exemplu din pat într-un scaun rulant sau într-un scaun cu WC și invers. Elevatorul nu trebuie utilizat pentru transportul pacientului.
- În timpul ridicării persoanei, asigurați-vă că frânele roților posterioare sunt blocate.
- În timpul transferului, evitați trecerea peste obstacole care ar putea provoca o răsturnare.
- Cu pacientul aflat în ham, deplasați dispozitivul numai cu spătarul montat corect



ATENȚIE!

Verificați întotdeauna starea bună a hamurilor. Nu folosiți hamuri care prezintă semne de deteriorare sau de uzură.

Elevatorul Muevo Home, deși are un grad de protecție IP54, nu este destinat utilizării în contact direct cu lichide; prin urmare, acordați o atenție deosebită protecției echipamentelor electronice de la bord împotriva jeturilor de apă sau a altor lichide.

11. CURĂȚARE ȘI IGIENIZARE

Pentru curățarea hamurilor și a structurii, utilizați o soluție de alcool și săpun neutru în părți egale, amestecate cu apă.

Pentru hamuri și capitonajul spătarului, respectați indicațiile de mai jos:



Temperatură maximă de spălare 30°C; procedeu normal



A nu se folosi înălțător



A nu se usca în uscătorul de rufe



A nu se călca



A nu se curăța chimic

12. ÎNTREȚINERE

Este extrem de important ca elevatorul să fie verificat înainte de fiecare utilizare:

- Verificați ca toate șuruburile și buloanele să fie bine strânse și ca hamul, chingile și cataramele să fie intacte
- Verificați ca elevatorul să se poată deplasa liber, cu frânele roților neacționate
- Verificați frânele roților posterioare pentru o funcționare corectă
- Piese mecanice trebuie lubrificate cu o picătură de ulei pentru a favoriza glisarea ușoară și rezistența la uzură
- Lubrifiați conform indicațiilor de mai sus la fiecare două sau trei luni

13. PIESE DE SCHIMB ȘI ACCESORII

Pentru piesele de schimb și accesorii consultați întotdeauna catalogul Master MORETTI.

Accesorii

Cod.RIA201 Ham standard (1 buc. furnizată din serie cu RI900 și RI905)

Cod.RIA211 Ham pentru WC

Cod.RIA910 Braț de ridicare central pentru persoane, cu traversă rotativă la 360° cu 4 cârlige

Dacă achiziționați accesoriul RIA910, pot fi utilizate următoarele modele de hamuri pentru elevatoarele MUEVO, care se montează pe traversa cu care este dotat accesoriul:

Cod.RP881 Ham standard cu tetieră "basic"

Cod.IM100-IM101 Ham standard fără tetieră

Cod.IM110-IM111 Ham standard cu tetieră

Cod.IM120 Ham de susținere cu bare rigide

Cod.IM140 Ham pentru toaletă fără tetieră


Cod.IM141 Ham pentru toaletă cu tetieră

Cod.IM150 Ham de susținere pentru amputați

UTILIZAȚI NUMAI ACCESORII ORIGINALE MORETTI. ÎN CAZ CONTRAR, SE DECLINĂ ORICE RESPONSABILITATE PENTRU INCIDENTELE CAUZATE DE O UTILIZARE IMPROPRIE.

14. CARACTERISTICI TEHNICE

Dimensiuni structură RI900

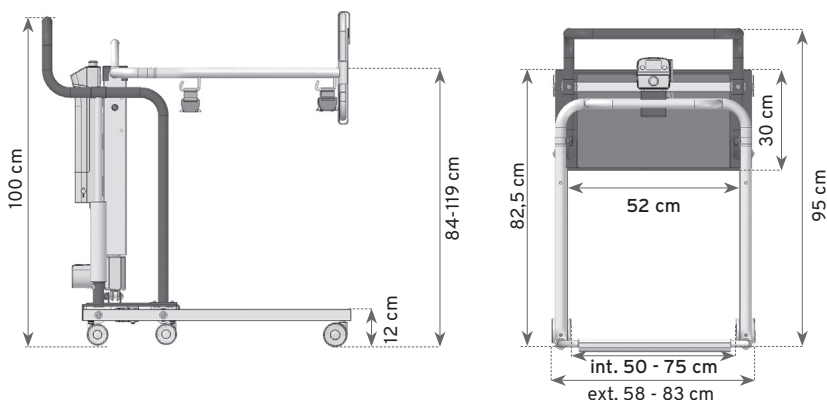


Greutate totală cu structură și kit electric (baterie inclusă): 57 Kg

Capacitate max.: 180 Kg

Cu hamul din dotare (RIA201, RIA211) este posibilă preluarea unei persoane de la o înălțime de circa 25 cm de la sol.

Dimensiuni structură RI905

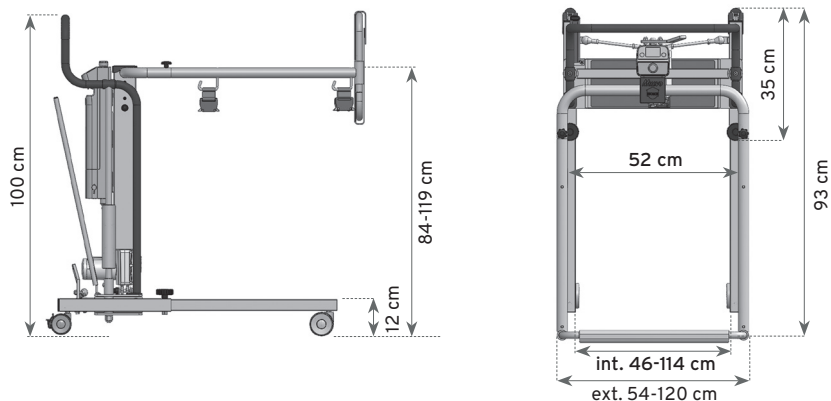


Greutate totală cu structură și kit electric (baterie inclusă): 39 Kg

Capacitate max.: 135 Kg

Cu hamul din dotare (RIA201, RIA211) este posibilă preluarea unei persoane de la o înălțime de circa 25 cm de la sol.

Dimensiuni structură RI900 și RI905 cu accesoriul RIA910

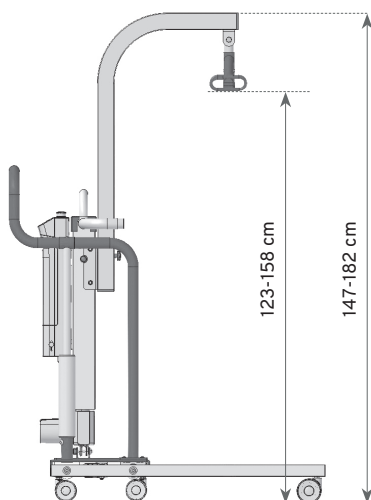

Capacitatea accesoriului RIA910 este dată de capacitatea maximă a dispozitivului (RI900 sau RI905) împreună cu care este utilizat accesoriul RIA910.

Interval de temperatură de funcționare RI900 și RI905: +5°C~+45°C

15. CONDIȚII DE ELIMINARE

În cazul eliminării dispozitivului, nu folosiți niciodată sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor solide urbane. Se recomandă în schimb eliminarea dispozitivului prin punctele ecologice municipale, în vederea operațiunilor prevăzute de reciclare a materialelor utilizate.

15.1 Avertismente pentru eliminarea corectă a produsului

conform directivei europene 2012/19/UE

La sfârșitul duratei sale de viață, produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile urbane. Acesta poate fi predat centrelor de colectare selectivă organizate de administrațiile locale sau distribuitorilor care oferă acest serviciu. Eliminarea separată a produsului permite evitarea unor posibile consecințe negative asupra mediului și a sănătății, rezultate dintr-o eliminare necorespunzătoare, și permite recuperarea materialelor din care este compus, pentru a obține o economie importantă de energie și de resurse. Pentru a sublinia obligația de a elimina separat aparatura electromedicală, pe produs este aplicat simbolul pubelei cu roți barate.

15.2 Tratarea bateriilor uzate (directiva 2006/66/CE)

Simbolul de pe produs indică faptul că bateriile nu trebuie considerate un deșeu menajer obișnuit. Asigurându-vă că bateriile sunt eliminate corect, contribuiți la prevenirea unor potențiale consecințe negative asupra mediului și a sănătății, care ar putea fi cauzate de eliminarea lor necorespunzătoare. Reciclarea materialelor ajută la conservarea resurselor naturale. Predați bateriile uzate la punctele de colectare indicate pentru reciclare. Pentru informații mai detaliate privind eliminarea bateriilor uzate sau a produsului, puteți contacta primăria, serviciul local de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat aparatul.

16. GARANȚIE

Toate produsele Moretti sunt garantate împotriva defectelor de material sau de fabricație pentru o perioadă de 2 (doi) ani de la data vânzării produsului, cu excepția eventualelor excluderi și limitări specificate în continuare. Această garanție nu este valabilă în caz de utilizare improprie, abuz sau modificare a produsului și în caz de nerespectare a instrucțiunilor de utilizare. Destinația corectă de utilizare a produsului este indicată în manualul de utilizare. Moretti nu este responsabil pentru daunele rezultate, pentru leziunile corporale sau pentru orice altceva cauzat de instalarea și/sau utilizarea echipamentului în mod neconform cu instrucțiunile din manualele de instalare, montaj și utilizare. Moretti nu garantează produsele Moretti împotriva daunelor sau defectelor în următoarele condiții: calamități naturale, operațiuni de întreținere sau reparație neautorizate, daune provocate de probleme ale alimentării electrice (acolo unde este prevăzută), utilizarea de piese sau componente nefurnizate de Moretti, nerespectarea ghidurilor și a instrucțiunilor de utilizare, modificări neautorizate, daune de transport (diferite de expedierea originală de la Moretti) sau neefectuarea întreținerii conform indicațiilor din manual. Nu sunt acoperite de această garanție componentele supuse uzurii, dacă dauna se datorează utilizării normale a produsului.

16.1 Garanția bateriilor reîncărcabile

Bateriile originale și cele de schimb sunt acoperite de o garanție de 90 (nouăzeci) de zile în ceea ce privește performanțele și de 6 (șase) luni în ceea ce privește defectele de fabricație sau conform prevederilor legale. Dacă bateriile complet încărcate sunt lăsate neutilizate mai mult de trei luni consecutive, garanția se anulează automat. Dacă bateriile complet descărcate sunt lăsate neutilizate mai mult de trei zile consecutive, garanția se anulează automat.

16.2 Reparații

În cazul în care un produs Moretti prezintă defecte de material sau de fabricație în perioada de garanție, Moretti va evalua împreună cu clientul dacă defectul produsului este acoperit de garanție. Moretti, la discreția sa exclusivă, poate înlocui sau repara articolul aflat în garanție, la un distribuitor Moretti indicat sau la propriul sediu. Costurile de manoperă aferente reparației produsului pot fi suportate de Moretti dacă se stabilește că reparația intră în sfera garanției. O reparație sau o înlocuire nu reînnoiește și nu prelungește garanția. Un produs neacoperit de garanție poate fi returnat pentru reparație numai după obținerea autorizației prealabile din partea serviciului clienți Moretti. Costurile de manoperă și de expediere aferente unei reparații neacoperite de garanție vor fi suportate integral de client sau de distribuitor. Reparațiile produselor neacoperite de garanție sunt garantate 6 (șase) luni, începând din ziua în care se primește produsul reparat. Clientul va fi înștiințat dacă, după examinarea și testarea unui produs returnat, Moretti stabilește că produsul nu este defect. Produsul va fi returnat clientului, iar costurile de expediere aferente returnării vor fi în sarcina acestuia.

16.3 Piese de schimb

Piesele de schimb originale Moretti sunt garantate 6 (șase) luni începând din ziua în care se primește piesa de schimb.

16.4 Clauze de exonerare

Cu excepția celor specificate expres în această garanție și în limitele legii, Moretti nu oferă nicio altă declarație, garanție sau condiție, expresă sau implicită, inclusiv eventuale declarații, garanții sau condiții de vandabilitate, de adecvare pentru un anumit scop, de neîncălcare și de neinterferență. Moretti nu garantează că utilizarea produsului Moretti va fi neîntreruptă sau lipsită de erori. Durata eventualelor garanții implicite care pot fi impuse de normele legale este limitată la perioada de garanție, în limitele prevederilor legale. Unele state sau țări nu permit limitări privind durata unei garanții implicite ori excluderea sau limitarea daunelor accidentale sau indirecte în legătură cu produse destinate consumatorilor. În astfel de state sau țări, unele excluderi sau limitări ale acestei garanții pot să nu se aplice utilizatorului. Prezenta garanție poate suferi modificări fără preaviz.

[illegible]



CERTIFICAT DE GARANȚIE

Produs _____

Cumpărat la data _____

Distribuitor _____

Strada _____ Localitate _____

Vândut către _____

Strada _____ Localitate _____



Via Bruxelles, 3 - Melegnano 20132 Cavriaga (Arezzo) Tel. +39 055 96 21 11

www.morettispa.com email: info@morettispa.com

MADE IN ITALY

MORETTI S.P.A.

Via Bruxelles, 3 - Meleto
52022 Cavriglia (Arezzo)

Tel. +39 055 96 21 11
Fax. +39 055 96 21 200

www.morettispa.com
info@morettispa.com