

MANUAL DE UTILIZARE

DW-MW2415

Scaun cu roțile manual



Informații despre produs

Destinația produsului

Scaunul cu roțile manual DW-MW2415 este destinat deplasării persoanelor cu mobilitate redusă, în interior și pe suprafețe exterioare netede și stabile. Scaunul poate fi autopropulsat de utilizator prin intermediul roților mari din spate sau împins de un însoțitor prin mânerele din spate. Utilizarea produsului în alte scopuri decât cele descrise în prezentul manual nu este permisă.

Specificații tehnice

Denumire produs	Scaun cu roțile manual
Cod produs	DW-MW2415
Material	Oțel carbon
Greutate netă	13 kg
Greutate brută	15 kg
Capacitate maximă	100 kg
Dimensiuni produs	103 × 68 × 86 cm
Lățime pliat	27 cm
Lățime ședere	45 cm
Adâncime ședere	42 cm
Înălțime ședere de la sol	45 cm
Roți față	7 inch
Roți spate	24 inch
Dimensiuni ambalaj	88 × 26 × 87 cm
Cantitate per cutie	1 buc.



Vedere din față — DW-MW2415

IMPORTANT

- Nu depășiți capacitatea maximă de încărcare de **100 kg**. Depășirea acestei limite poate duce la deteriorarea cadrului și la accidentare.
- Verificați înainte de fiecare utilizare ca roțile, frânele și suporturile pentru picioare să fie corect fixate și funcționale.

Instrucțiuni de utilizare

Utilizarea în siguranță

- 1 Prima utilizare.** La prima deplasare cu scaunul cu roțile, utilizatorul trebuie să poarte centura de siguranță și să fie însoțit permanent de o altă persoană.
- 2 Frânele.** Acționați întotdeauna frânele înainte de a vă așeza în scaun și înainte de a vă ridica din acesta.
- 3 Suporturile pentru picioare.** La așezarea în scaun sau la ridicarea din el, este interzis să stați în picioare pe suporturile pentru picioare sau să vă sprijiniți cu greutatea corpului pe acestea.
- 4 Poziția corectă.** În timpul deplasării, mențineți-vă echilibrul, cu corpul sprijinit aproape de spătar.
- 5 Centrul de greutate.** Nu vă aplecați în afara scaunului. Deplasarea centrului de greutate poate provoca răsturnarea scaunului în condiții nefavorabile.
- 6 Coborârea pantelor.** Frânele scaunului cu roțile nu trebuie folosite pentru reducerea vitezei la coborârea unei pante. Acestea sunt destinate exclusiv imobilizării scaunului în staționare.
- 7 Schimbarea direcției pe pantă.** Schimbarea direcției în timpul coborârii unei pante destabilizează scaunul cu roțile. Manevrați cu prudență sporită.
- 8 Trecerea peste obstacole.** La întâlnirea unui obstacol, însoțitorul apasă cu piciorul pârghia de basculare situată în partea inferioară, lângă roata mare, și împinge simultan în jos mânerul de împingere. Roțile din față se ridică și trec peste obstacol. Roțile din față nu trebuie să lovească direct obstacolul, pentru evitarea oricărui pericol.

Verificări periodice

Înainte de prima utilizare a scaunului cu roțile și pe parcursul primei luni de folosire, verificați dacă șuruburile sunt slăbite. Dacă sunt slăbite, strângeți-le la timp.

În regim normal de utilizare, efectuați o verificare lunară pentru a vă asigura că toate componentele sunt în stare bună. Verificați toate piulițele de fixare ale scaunului cu roțile — în special piulițele de fixare ale axului roților din spate. Dacă se constată slăbirea acestora, ele trebuie reglate și strânse la timp.

Întreținere, avertismente și îngrijire

Avertismente generale

CITIȚI CU ATENȚIE

- Nu utilizați scaunul cu roțile dacă observați componente deteriorate, fisurate sau lipsă. Scoateți produsul din uz până la remediere.
- Nu efectuați modificări asupra cadrului sau componentelor produsului.
- Nu lăsați utilizatorul nesupravegheat pe suprafețe înclinate, chiar și cu frânele acționate.
- Utilizați exclusiv piese de schimb compatibile, furnizate de distribuitor.

Pliere, desfacere și transport

Plierea: ridicați sau rabatați lateral suporturile pentru picioare, apucați șezutul de marginea din față și de cea din spate și trageți-l vertical în sus, până când cadrul se strânge complet (lățime pliat: 27 cm).

Desfacerea: apăsați ferm în jos pe marginile laterale ale șezutului, până când cadrul este complet deschis, iar șezutul este întins și orizontal. Verificați funcționarea frânelor înainte de a așeza utilizatorul în scaun.

Transportul: ridicați scaunul cu roțile numai de cadrul principal. Nu îl ridicați de suporturile pentru picioare, de cotiere sau de tapițerie.

Curățare și depozitare

Curățați cadrul și tapițeria cu o lavetă moale, ușor umezită, și un detergent neutru. Nu folosiți solvenți, substanțe abrazive sau jet de apă sub presiune. Ștergeți componentele metalice după curățare, pentru prevenirea coroziunii. Depozitați produsul în spații uscate, ferite de umezeală și de surse directe de căldură.

DISTRIBUTOR

GOLDEN PROTECT — SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L.

Sediu / Depozit: Strada Oașului 22B, Hala A, Otopeni, județul Ilfov

CIF: RO43110660 · **Reg. Com.:** J40/12485/2020

Web: goldenprotect.ro