

FIȘĂ DE PRODUS

Cărucior cu roțile din aluminiu, cu spătar rabatabil (reclinabil)

Cod produs: ALH 008 Producător: Timago International Group (Polonia)

Dispozitiv medical
CE • MD • UDI

Descriere

Cărucior cu roțile cu cadru din aluminiu, întărit cu dublă bară în X și prevăzut cu bară de stabilizare la mânerele de împingere pentru însoțitor. Șezutul și spătarul sunt din material nylon-bumbac, tapițate suplimentar cu huse din țesătură care permite circulația aerului.

Modelul are spătar extins cu tetieră și pernă pentru stabilizarea capului, roți anti-răsturnare și frână pentru însoțitor. Spătarul și suporturile pentru picioare se reglează unghiular în intervalul 0–90°, permițând poziția semi-culcată sau culcată. Roțile spate de 22" au cercuri de propulsie (autopropulsare), iar roțile față de 8" sunt din cauciuc plin, cu rezistență ridicată la abraziune.

Utilizare: interior și exterior. Poate fi autopropulsat de utilizator sau împins de însoțitor.

Elementele căruciorului

A	Mâner de împingere	B	Frână pentru însoțitor
C	Manetă înclinare spătar	D	Cotieră
E	Buton blocare cotieră rabatabilă	F	Frână de parcare
G	Șurub bară de stabilizare	H	Roată spate 22" cu cerc de propulsie*
I	Suport gambă	J	Suport picioare
K	Manetă reglare suport picioare	L	Pini de fixare suport picioare
M	Reglaj centru de greutate	N	Roți anti-răsturnare

* disponibil în varianta cu roți pline sau pneumatice



CARACTERISTICI PRINCIPALE

- **Cadru** din aluminiu, ușor și rezistent, întărit cu dublă bară în X
- **Spătar extins** reglabil 0–90°, cu tetieră și pernă de stabilizare a capului (prindere cu velcro)
- **Suporturi pentru picioare** reglabile unghiular 0–90°, cu suport pentru gambă, detașabile și pivotante
- **Cotiere** rabatabile, cu buton de blocare – facilitează transferul lateral
- **Frâne de parcare** pe ambele roți spate + frână pentru însoțitor cu blocare, montate sub mânere
- **Bară de stabilizare** la mânerele de împingere, pentru control sporit de către însoțitor
- **Roți anti-răsturnare** reglabile pe înălțime
- **Reglaj al centrului de greutate** pentru pacienți cu amputații la nivelul membrelor inferioare (reglaj efectuat de personal calificat)
- **Centură de siguranță** cu cataramă, inclusă în echiparea standard
- **Pliabil** – lățime pliat 33 cm, ușor de transportat și depozitat

SETUL INCLUDE

Cadru cu șezut, suporturi pentru picioare, tetieră, tapițerie cu pernă de stabilizare a capului, pompă, chei de montaj.

DESTINAȚIE DE UTILIZARE

Cărucior destinat persoanelor cu dificultăți de deplasare independentă și pacienților cu disfuncții sau mobilitate redusă. Recomandat în special în cazul afecțiunilor precum:

- paralizie, paralizie cerebrală
- leziuni sau amputații ale membrelor
- degenerări sau deformări ale membrelor
- afecțiuni cardiace și vasculare, tulburări circulatorii
- supraponderalitate sau subponderalitate patologică

DATE TEHNICE

Parametru	Valoare
Lățime totală	67 – 74 cm
Lățime interioară (șezut)	43 / 46 / 50 cm
Lungime totală	117 cm
Înălțime șezut de la sol	46 cm
Înălțime totală	124 cm
Dimensiuni șezut (lățime × adâncime)	42 / 45 / 49 × 40 cm
Unghi reglare spătar	0° – 90°
Unghi reglare suport picioare	0° – 90°
Roți spate	22", cu cercuri de propulsie (pline sau pneumatice)
Roți față	8", cauciuc plin, rezistente la abraziune
Greutate cărucior	19,30 – 21,80 kg
Sarcină maximă	100 kg (mărimile 43 și 46 cm) 120 kg (mărimea 50 cm)
Lățime pliat	33 cm
Material cadru	Aluminiu, cadru întărit cu dublă bară în X
Material tapițerie	Nylon-bumbac cu huse din țesătură respirabilă
Culoare tapițerie	Negru
Frâne	Frâne de parcare pe roțile spate + frâne pentru însoțitor (cu blocare)
Siguranță	Roți anti-răsturnare reglabile, centură de siguranță cu cataramă

REGLAJE ȘI FUNCȚII

- **Înclinarea spătarului** – prin apăsarea manetelor (C) situate deasupra mânerelor; suporturile pentru picioare – prin maneta (K) de lângă suportul de gambă.
- **Frânele de parcare** – se împinge maneta înainte până la blocarea completă a roții (separat stânga/dreapta); frânele însoțitorului se blochează prin tragerea manetei și se eliberează prin butonul roșu de sub manetă.
- **Cotierele rabatabile** – se deșurubează butonul din partea frontală a cotierei și se ridică; remontarea se face în orificiile de fixare, apoi se strânge butonul.
- **Roțile anti-răsturnare** – se trage blocajul, se deplasează roțile în sus/jos și se alege înălțimea potrivită.
- **Umflarea roților** – la varianta pneumatică se verifică periodic presiunea și starea anvelopelor (uzură, tăieturi).

Curățare și întreținere

- Tapițeria și perna se curăță cu o lavetă umedă (nu udă), cu apă rece sau caldă, fără detergenți; petele dificile – cu burete. Nu se îmbibă excesiv; se usucă departe de surse de căldură.
- Elementele din plastic se curăță cu lavetă umedă, eventual cu produse dedicate pentru plastic, respectând instrucțiunile producătorului.
- Se verifică periodic strângerea șuruburilor, funcționarea frânelor și rotirea liberă a roților.

Depozitare, transport și garanție

- A nu se expune la lumina directă a soarelui, apă sau umezeală.
- Produsul este acoperit de garanție conform certificatului de garanție; pentru garanție se păstrează dovada achiziției (bon fiscal sau factură).
- Producătorul nu răspunde pentru utilizarea necorespunzătoare, nerespectarea regulilor de siguranță sau folosirea contrar destinației.

CONFORMITATE ȘI IDENTIFICARE

Produsul poartă marcajul CE și simbolul MD – producătorul a evaluat conformitatea cu cerințele esențiale aplicabile dispozitivelor medicale. Eticheta produsului conține: număr de referință (REF), număr de lot (LOT), număr de serie (SN), cod UDI și datele producătorului.

Producător

Timago International Group Ossowski Sp. k.
ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Polonia
Tel.: +48 33 499 50 00 • E-mail: info@timago.com
www.timago.com

Distribuitor în România

Golden Protect – SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L.
Str. Oașului 22B, Hala A, Otopeni, Ilfov
Importator/distribuitor autorizat de dispozitive medicale –
aviz ANMDR nr. 10007/25.10.2024
www.goldenprotect.ro