

FIȘĂ DE PRODUS

Scaun rulant reclinabil din aluminiu, cu tetieră și suporturi elevabile pentru picioare

Cod produs: **NEURO-TIM** Producător: **Timago International Group (Polonia)**

Dispozitiv medical
CE • MD • UDI

Descriere

Scaun rulant reclinabil cu cadru din aluminiu, întărit cu bară transversală dublă, destinat persoanelor care au nevoie de stabilizarea spatelui și a capului. Este dotat cu bară orizontală suplimentară de stabilizare la mânerele de împingere, spătar prelungit, tetieră cu pernă, cotiere rabatabile, roți anti-răsturnare, suporturi elevabile pentru picioare (ELR), frâne de staționare și frâne pentru însoțitor.

Spătarul se înclină în intervalul 15°–70°, iar suporturile pentru picioare între 25° și 90°, permițând poziția semi-culcată. Roțile spate pline de 22" au eliberare rapidă și inele de propulsie (autopropulsare), iar roțile față pline de 8" au amortizoare și reglarea centrului de greutate.

Utilizare: interior și exterior. Poate fi autopropulsat de utilizator sau împins de însoțitor.

Elementele scaunului rulant

A Tetieră cu pernă	B Spătar prelungit
C Manetă înclinare spătar	D Mâner de împingere cu bară de stabilizare
E Frână pentru însoțitor	F Știft de blocare cotieră
G Frână de staționare	H Roată spate 22" cu eliberare rapidă și inel de propulsie
I Roată față 8" cu reglaj centru de greutate și amortizor	J Placă suport pentru picioare
K Pârghie suport pentru picioare	L Suport pentru gambă
M Șezut*	N Cotieră (suport de braț)
O Roată anti-răsturnare	

* disponibil în varianta cu lățime șezut 46 sau 48 cm



Vedere din spate



Vedere laterală – spătar înclinat

CARACTERISTICI PRINCIPALE

- **Cadru** din aluminiu, ușor și rezistent, întărit cu bară transversală dublă
- **Spătar prelungit** reglabil 15–70°, cu tetieră și pernă pentru stabilizarea capului
- **Suporturi elevabile pentru picioare** (ELR), reglabile 25–90°, cu suport pentru gambă, detașabile și pivotante
- **Cotiere rabatabile** cu știft de blocare – facilitează transferul lateral al pacientului
- **Bară orizontală de stabilizare** la mânerele de împingere, pentru siguranță și control sporit de către însoțitor
- **Frâne de staționare** pe ambele roți spate + frâne pentru însoțitor cu blocaj de parcare, montate sub mâner
- **Roți spate** pline, 22", cu eliberare rapidă și inele de propulsie (autopropulsare)
- **Roți față** pline, 8", cu amortizoare și reglarea centrului de greutate
- **Roți anti-răsturnare** reglabile pe lungime, cu cleme de fixare

- **Reglaj al centrului de greutate** pentru pacienți cu amputații la nivelul membrelor inferioare (reglaj efectuat de personal calificat)
- **Pliabil** – 88 × 33 × 94 cm pliat, ușor de transportat și depozitat

SETUL INCLUDE

Cadru cu șezut, suporturi elevabile pentru picioare, tetieră cu pernă, tapițerie, roți anti-răsturnare cu cleme de fixare (2 buc.), chei pentru asamblare.

DESTINAȚIE DE UTILIZARE

Scaun rulant destinat persoanelor cu dificultăți de deplasare autonomă și pacienților cu disfuncții și mobilitate redusă, în special celor care necesită stabilizarea spatelui și a capului. Recomandat în cazul afecțiunilor precum:

- paralizie, paralizie cerebrală
- leziuni sau amputații ale membrelor
- degenerări sau deformări ale membrelor
- boli cardiovasculare, tulburări de circulație
- supraponderalitate sau subponderalitate patologică

DATE TEHNICE

Parametru	Valoare
Lățime totală	67 cm
Dimensiuni șezut (lățime × adâncime)	46 sau 48 × 42 cm
Înălțime cotiere față de șezut	24 cm
Adâncime (lungime) totală	113 cm
Înălțime șezut de la sol	50 cm
Înălțime totală	130 cm
Unghi înclinare spătar	15° – 70°
Unghi reglare suporturi pentru picioare	25° – 90°
Roți spate	22", pline, cu eliberare rapidă și inele de propulsie
Roți față	8", pline, cu amortizoare și reglarea centrului de greutate
Greutate scaun	17,50 kg
Sarcină maximă utilizator	120 kg
Dimensiuni pliat	88 × 33 × 94 cm
Material cadru	Aluminiu, întărit cu bară transversală dublă
Culoare cadru	Negru
Frâne	Frâne de staționare pe roțile spate + frâne pentru însoțitor cu blocaj de parcare
Siguranță	Roți anti-răsturnare reglabile (2 buc., cu cleme de fixare), bară de stabilizare la mâner
Conformitate	Dispozitiv medical, marcat CE, cod UDI

REGLAJE ȘI FUNCȚII

- **Înclinarea spătarului** – prin apăsarea manetelor (C) situate deasupra mânerelor de împingere; interval 15–70°.
- **Suporturile pentru picioare** – se ridică manual sau se coboară prin apăsarea pârghiei (K) de lângă suportul de gambă; interval 25–90°. Plăcuțele se reglează cu șurubul de pe țeavă, astfel încât unghiul dintre trunchi și coapse să fie de 90°.

- **Frânele de staționare** – se împinge maneta (G) înainte până la blocarea completă a roții, separat stânga/dreapta; se folosesc doar când scaunul este complet oprit.
- **Frânele pentru însoțitor** – se trag manetele (E) de sub mânere; au blocaj de parcare, care se eliberează prin apăsarea comutatorului roșu de sub manete.
- **Cotierele rabatabile** – se ridică după deblocarea știftului (F); remontarea se face în orificiile de fixare.
- **Roțile anti-răsturnare** – se scoate clema de fixare, se alege lungimea potrivită și se fixează din nou.
- **Reglarea frânei de staționare** – dacă frâna opune rezistență prea mare sau nu blochează roata, se repoziționează cu ajutorul șuruburilor de fixare.
- **Centrul de greutate** – pentru pacienți cu amputații: se slăbesc șuruburile roților față și se mută axul în sus/jos, egal pe ambele părți. Reglaj rezervat personalului calificat.

PLIERE PENTRU TRANSPORT

Se rotesc plăcuțele suporturilor pentru picioare în poziție verticală sau se scot; se detașează tapițeria și tetiera; se apasă comutatorul roșu de pe bara de stabilizare din spatele spătarului pentru a plia bara; se trage șezutul în sus, din față și din spate.

Curățare și întreținere

Tapițeria și perna se curăță cu o cârpă umedă (nu udă) și apă rece sau caldă, fără detergenți. Petele dificile se îndepărtează cu un burete. Nu se udă excesiv; se usucă departe de surse de căldură.

Părțile din plastic se curăță cu o cârpă umedă, eventual cu detergenți adecvați pentru plastic, respectând instrucțiunile producătorului.

Se verifică periodic funcționarea frânelor, fixarea roților cu eliberare rapidă și a roților anti-răsturnare.

Depozitare și garanție

Produsul nu se expune la lumina directă a soarelui, apă sau umezeală.

Produsul este acoperit de garanție conform certificatului de garanție. Pentru a beneficia de garanție se păstrează dovada achiziției (bon sau factură).

Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru utilizarea necorespunzătoare a produsului sau nerespectarea normelor de siguranță.

MARCAJE DE PE ETICHETĂ

REF	Număr de referință	LOT	Număr de lot
SN	Număr de serie	UDI	Cod UDI
MD	Dispozitiv medical	CE	Conformitate cu cerințele esențiale pentru dispozitive medicale

Producător

Timago International Group

Ossowski Sp. k.

ul. Karpacka 24/12, 43-316 Bielsko-Biała, Polonia

T: +48 33 499 50 00 • E: info@timago.com •

www.timago.com

Manual de utilizare: ediția 08/2025 (I), disponibil în limba română.

Distribuitor în România

Golden Protect – SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L.

CIF RO43110660 • Str. Oașului 22B, Hala A, Otopeni, Ilfov

Importator / distribuitor autorizat de dispozitive medicale

Aviz ANMDR nr. 10007 / 25.10.2024 • EUDAMED: RO-IM-000004410

www.goldenprotect.ro • contact@goldenprotect.ro