

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Scaun cu roțile multifuncțional cu spătar înalt DW-MW2411

Spătar rabatabil cu tetieră · suporturi de picioare ridicabile · masă detașabilă · funcție toaletă



Imagine cu titlu informativ

Scaunul cu roțile **DW-MW2411** este un scaun de tip **nursing** (îngrijire), pentru persoane cu mobilitate redusă care petrec perioade lungi în scaun, acasă sau în unități de îngrijire. Spătarul înalt rabatabil cu tetieră permite odihna în poziție semi-culcată, iar suporturile de picioare ridicabile, masa detașabilă și funcția de toaletă reduc nevoia de transfer a pacientului.

Cod produs	DW-MW2411
Denumire producător	High Back Nursing Wheelchair
Categorie	Dispozitiv medical – scaune cu roțile manuale
Producător	Dragon Medical, China
Distribuitor	SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. – Golden Protect
Utilizare	Interior și exterior, suprafețe plane

Marcaj CE

Dispozitiv medical (MD)

Capacitate 100 kg

Cadru oțel pliabil

DATE TEHNICE

DIMENSIUNI ȘI GREUTATE		CONSTRUCȚIE ȘI AMBALARE	
Dimensiuni totale (L x l x H)	122 x 67 x 120 cm	Material cadru	Oțel
Dimensiuni pliat (L x l x H)	93,5 x 26,5 x 94 cm	Capacitate maximă de încărcare	100 kg
Lățime șezut	46 cm	Roți față	8" (20 cm), pivotante
Adâncime șezut	42 cm	Roți spate	24" (61 cm), cu cerc de propulsie
Înălțime șezut (pernă) față de sol	51 cm	Frâne	De mână, pe mânerurile de împingere
Înălțime spătar ridicat	35 cm	Dimensiuni ambalaj	94 x 27 x 95,5 cm
Greutate netă	22 kg	Ambalare	1 buc / cutie
Greutate brută	24 kg		

CARACTERISTICI

- **Spătar înalt, rabatabil**, cu tetieră capitonată – odihna în poziție semi-culcată, fără transfer în pat.
- **Suporturi de picioare ridicabile**, cu perne pentru gambe – utile în edeme, imobilizări sau după intervenții la membrele inferioare.
- **Masă detașabilă** cu suporturi pentru pahar – pentru masă, citit sau activități la scaun.
- **Funcție de toaletă**: șezut cu decupaj și vas colector detașabil, accesibil de sub scaun.
- **Cadru din oțel, pliabil** – stabil la 100 kg; pliat, doar 26,5 cm lățime.
- **Cotiere capitonate**, frâne pe mânerurile de împingere și levier de basculare pentru trecerea peste obstacole.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. La prima utilizare, purtați centura de siguranță și fiți însoțit de o altă persoană.
2. Acționați frânele înainte de a vă așeza în scaun sau de a vă ridica din el.
3. La așezare și la ridicare, nu vă sprijiniți și nu apăsați pe suporturile de picioare – riscul de răsturnare este ridicat.
4. În timpul deplasării, mențineți echilibrul, cu trunchiul lipit de spătar.
5. Nu vă aplecați în afara scaunului: modificarea centrului de greutate poate destabiliza scaunul.
6. Frânele nu sunt destinate încetinerii scaunului la coborârea pantelor; ele se folosesc doar pentru staționare.
7. Schimbarea direcției la coborâre destabilizează scaunul – manevrați cu atenție și, pe cât posibil, cu însoțitor.
8. La obstacole (prag, bordură), însoțitorul apasă cu piciorul levierul de basculare de lângă roata mare și trage în jos mânerul; roțile din față se ridică peste obstacol. Nu loviți obstacolul frontal cu roțile mici.



VERIFICARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Înainte de prima utilizare și în prima lună, verificați dacă șuruburile și piulițele sunt strânse; strângeți-le la nevoie.
- În utilizare normală, verificați lunar starea generală a scaunului și toate piulițele de fixare, în special cele ale axului roților din spate; reglați și strângeți imediat orice element slăbit.
- Curățați tapițeria și cadrul cu lavetă umedă și detergent neutru; nu folosiți solvenți sau abrazivi.
- Verificați periodic frânele și anvelopele; la uzură vizibilă, înlocuiți piesele prin distribuitor.

INDICAȚII DE UTILIZARE

- Pacienți imobilizați sau cu mobilitate sever redusă, care au nevoie de poziționare și odihnă în scaun.
- Îngrijire la domiciliu, cămine de bătrâni, centre de recuperare și secții de spital.
- Persoane cu afecțiuni ale membrilor inferioare care necesită ridicarea gambelor.
- Situații în care transferul pacientului la toaletă este dificil sau riscant.

Avertizări. Nu depășiți capacitatea maximă de 100 kg. Nu utilizați scaunul pe scări, scări rulante sau pante abrupte. Nu lăsați pacientul nesupravegheat cu spătarul rabatat complet. Masa detașabilă nu se folosește ca sprijin pentru ridicare.

Document informativ întocmit de Golden Protect pe baza fișei de produs și a instrucțiunilor producătorului pentru modelul DW-MW2411. Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; imaginile sunt cu titlu de prezentare. Declarația de conformitate este disponibilă la cerere.