

Scaun de transfer pacienți cu ridicare hidraulică



1. Destinația produsului

Scaunul de transfer DW-TPC33 este destinat ridicării și transferului persoanelor imobilizate sau cu mobilitate redusă — din pat pe scaun, la toaletă sau la baie — de către un singur îngrijitor. Sistemul hidraulic acționat cu piciorul ridică pacientul lin, fără efort fizic din partea îngrijitorului, iar vasul de toaletă detașabil permite utilizarea dispozitivului și ca scaun de toaletă.

Produsul este recomandat pentru îngrijirea la domiciliu, cămine de bătrâni, centre de îngrijire, spitale și secții de recuperare.

2. Specificații tehnice

Model	DW-TPC33
Denumire	Scaun de transfer (Transfer Chair)
Sarcină maximă	150 kg
Dimensiuni șezut (L x I)	570 x 650 mm
Sistem de ridicare	Cilindru hidraulic, acționare cu piciorul
Material cadru	Oțel cu acoperire protectoare
Perne șezut / spătar	PU (poliuretan)
Vas toaletă	PP (polipropilenă), detașabil
Roți	Roți medicale cu frână
Centură de siguranță	Reglabilă
Greutate netă / brută	27 kg / 30 kg
Ambalare	Cutie de carton 64 x 58 x 53 cm, 1 buc / cutie


3. Conținutul coletului

Cadru principal cu bază și coloană • Ansamblu șezut cu spătar și perne PU • Tijă hidraulică cu pedală • 4 roți medicale • Vas de toaletă cu suport • Centură de siguranță • Elemente de asamblare. *Produsul se livrează dezasamblat; montajul se realizează conform capitoului 4, fără scule speciale.*

4. Montaj

Despachetați toate componentele și verificați conținutul coletului înainte de montaj. Urmăți pașii de mai jos, conform instrucțiunilor producătorului.

1

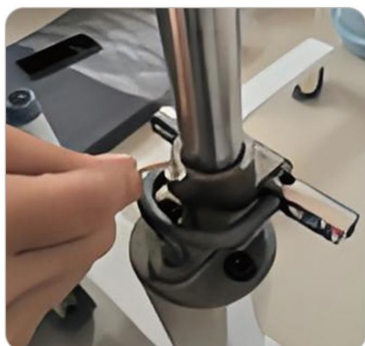

Pasul 1. Deșurubați șuruburile și fixați capacul de protecție.

2




Pasul 2. Presați roțile în locașurile lor până se fixează corect.

3



Pasul 3. Fixați coloana centrală.

4

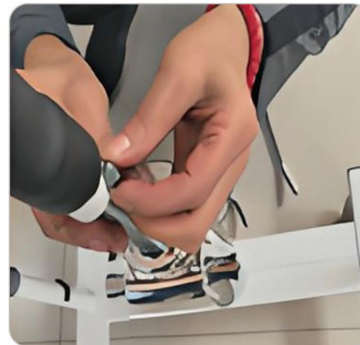

Pasul 4. Fixați cadrul principal.

5




Pasul 5. Presați tija hidrolică în poziția corectă.


6



Pasul 6. Fixați spătarul cu cele două tije mici.

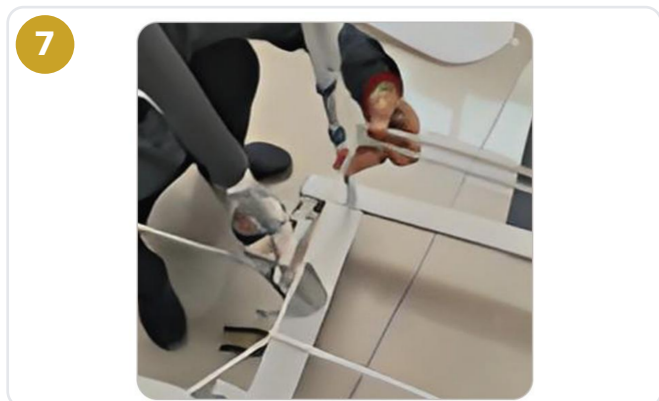


Pasul 7. Montați suportul pentru vasul de toaletă.

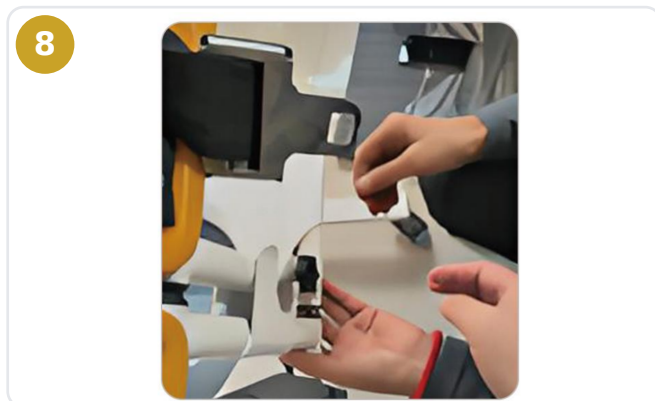

Pasul 8. Catarama de siguranță din spate: pentru utilizare, se deschide prin tragere în sus.

5. Utilizarea pompei hidraulice

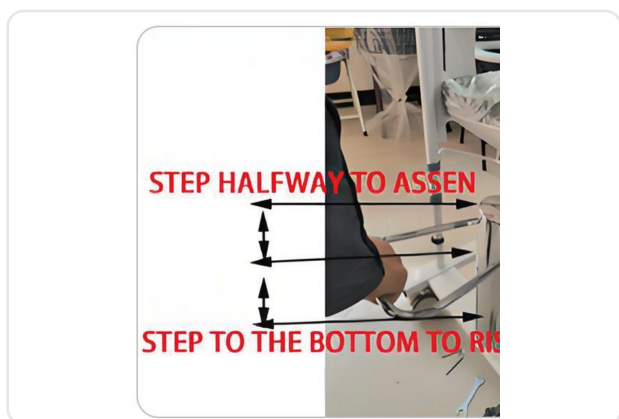

Pompa hidraulică se acționează cu piciorul, prin pedala din partea de jos a dispozitivului:

- **RIDICARE:** apăsați pedala repetat, pe cursă parțială (până la jumătatea cursei tijei). Șezutul urcă treptat, la fiecare apăsare.
- **COBORÂRE:** apăsați pedala complet, până la capătul de jos al cursei. Presiunea se eliberează, iar șezutul coboară lin.

6. Utilizarea dispozitivului la transferul pacientului

- Poziționați dispozitivul lângă pat sau scaun și blocați frânele tuturor roților.
- Coborâți șezutul la nivelul potrivit, așezați pacientul pe cele două jumătăți ale șezutului și sprijiniți-i spatele de spătar.
- Fixați centura de siguranță și verificați ca pacientul să fie stabil și confortabil.
- Ridicați pacientul acționând pedala hidraulică, până la înălțimea necesară transferului.
- Deblocați frânele și deplasați dispozitivul lent, pe suprafețe plane, ținând de mână.
- La destinație, blocați din nou frânele și coborâți lin pacientul, apoi desfaceți centura.

7. Curățare și dezinfecție

- Curățați suprafețele metalice și pernele PU cu o lavetă moale, umezită în apă cu detergent neutru; ștergeți apoi cu o lavetă uscată.
- Pentru dezinfecție folosiți dezinfectanți de suprafață uzuali, neabrazivi; respectați instrucțiunile producătorului dezinfectantului.
- Nu folosiți solvenți, substanțe abrazive sau bureți de sârmă — acestea pot deteriora acoperirea protectoare a cadrului.
- Goliți și spălați vasul de toaletă după fiecare utilizare; vasul din PP este detașabil și poate fi igienizat separat.
- Nu turnați apă direct pe mecanismul hidraulic și nu introduceți dispozitivul sub jet de apă.

8. Întreținere periodică

- Înainte de fiecare utilizare: verificați funcționarea frânelor, fixarea centurii de siguranță și stabilitatea șezutului.
- Săptămânal: verificați strângerea șuruburilor și a elementelor de asamblare; restrângeți dacă este necesar.
- Lunar: verificați starea roților (rotire liberă, fără fire sau păr încurcat pe ax), a pernelor PU și a tijei hidraulice (fără scurgeri de ulei).
- Dacă tija hidraulică prezintă scurgeri, nu mai ridică ferm sau coboară singură sub sarcină, întrerupeți utilizarea și contactați furnizorul.
- Depozitați dispozitivul în spații uscate, ferite de umezeală și de temperaturi extreme.

9. Avertismente de siguranță

- Nu depășiți sarcina maximă de 150 kg.
- Blocați întotdeauna frânele înainte de așezarea, ridicarea sau coborârea pacientului.
- Utilizați întotdeauna centura de siguranță în timpul ridicării și al deplasării.
- Nu lăsați pacientul nesupravegheat în dispozitiv.
- Nu utilizați dispozitivul pe suprafețe înclinate, denivelate sau alunecoase.
- Nu utilizați dispozitivul dacă prezintă componente deteriorate, slăbite sau lipsă.
- Dispozitivul este destinat transferului pe distanțe scurte, în interior; nu este un scaun cu roțile.

Pentru piese de schimb, service sau orice întrebări legate de produs, contactați Golden Protect prin datele de contact din subsolul acestui document. Păstrați acest manual pe toată durata de utilizare a produsului.