

Scaun de transfer pacienți cu masă și toaletă — DW-TPC09

1. Caracteristici

Scaunul de transfer DW-TPC09 are cadru metalic și este prevăzut cu spătar, șezut și cotiere capitonate (PU cu burete elastic), masă detașabilă din ABS cu coș de depozitare, vas de toaletă detașabil din PP, suporturi pentru picioare și roți silențioase cu frână. Înălțimea șezutului se reglează între 41 și 57 cm prin pompa hidraulică acționată cu pedala, permițând transferul pacientului fără efort fizic din partea îngrijitorului.



Elemente componente:

- A** Spătar capitonat
- B** Cotiere capitonate
- C** Șezut capitonat, cu decupaj
- D** Masă ABS detașabilă, cu coș
- E** Mânere de împingere
- F** Pompă hidraulică
- G** Pedală de acționare
- H** Suport pentru picioare
- I** Roți silențioase cu frână


Vas de toaletă PP detașabil — se montează sub șezut

2. Destinația produsului


Dispozitivul este destinat ridicării și transferului persoanelor imobilizate sau cu mobilitate redusă — din pat pe scaun, la toaletă sau la masă — exclusiv în interior și numai cu ajutorul unui însoțitor. Datorită vasului sanitar de sub șezut și al roților cu frână, îndeplinește atât funcția de transport, cât și pe cea de scaun de toaletă, facilitând activitățile zilnice de igienă. Este recomandat persoanelor cu dificultăți de deplasare cauzate de paralizie, afecțiuni ale membrelor sau articulațiilor, amputații, afecțiuni cardiovasculare sau circulatorii, precum și în recuperarea post-operatorie. Sarcina maximă: 150 kg.

3. Montaj


Înainte de montaj: se recomandă ca montajul să fie realizat de două persoane, din cauza greutății componentelor. Urmăți toți pașii de mai jos și verificați dispozitivul înainte de prima utilizare. Nu utilizați dispozitivul dacă ați omis vreun pas de montaj sau dacă din colet lipsesc componente.

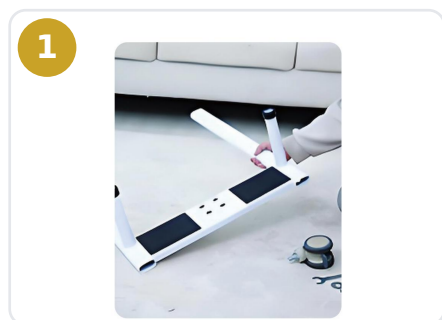


Pasul 1. Scoateți roțile și înșurubați-le pe cadrul de bază.

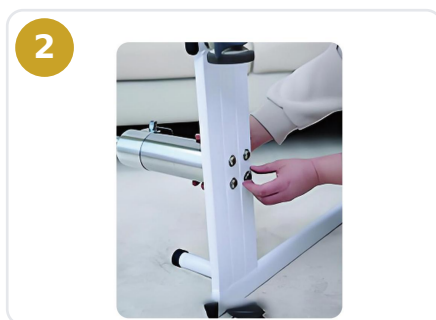


Pasul 2. Montați pompa hidraulică pe cadrul de bază.

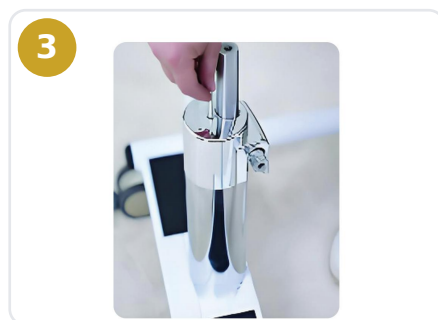


Pasul 3. Strângeți cu cheia imbus șuruburile din partea frontală a cilindrului hidraulic. Deșurubați capacul decorativ, apoi înșurubați la loc șurubul.

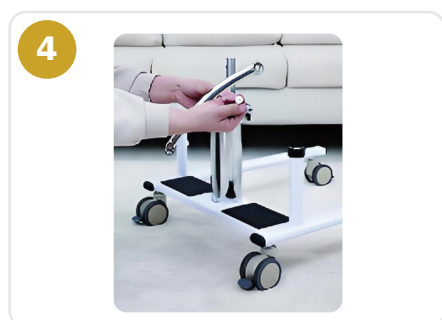


Pasul 4. Montați pedala de acționare și strângeți șurubul imbus. Strângeți capacul de protecție la exterior.

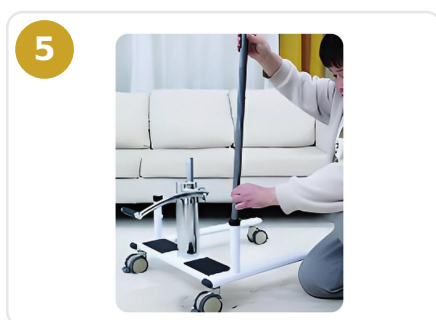


Pasul 5. Introduceți axul de oțel în orificiile de pe cele două laturi ale bazei și fixați-l în spate cu șuruburile albe.

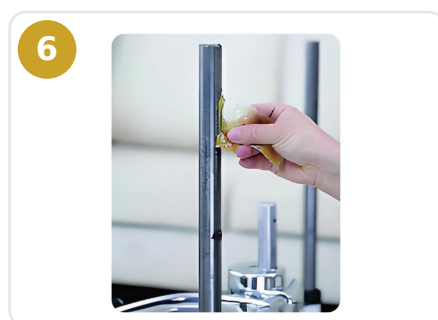


Pasul 6. Aplicați ulei de lubrifiere, uniform, pe ambele părți ale axului de oțel, pentru o glisare lină.

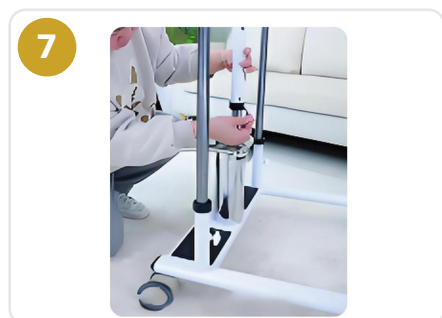


Pasul 7. Conectați țeava albă de legătură la orificiul pompei hidraulice.

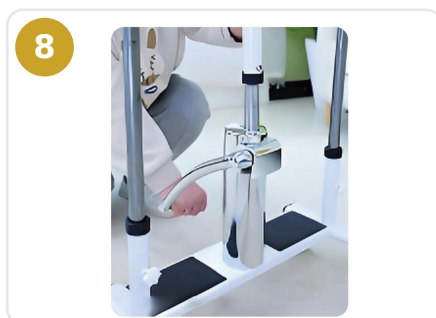


Pasul 8. Apăsați pedala până jos și mențineți-o apăsată. Țeava albă rotativă se conectează la partea superioară, aliniind orificiul cotierei.

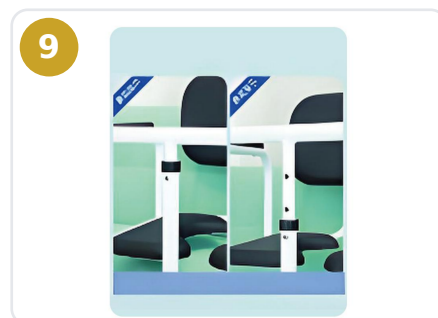

Pasul 9. Conectați cotierele la axurile de oțel de pe ambele părți. Dacă orificiile nu se aliniază, reluați pasul anterior (înălțime reglabilă).

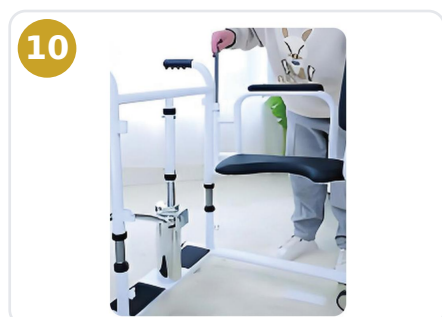

Pasul 10. Conectați șezutul și cotiera, introducându-le pe axul subțire de oțel.

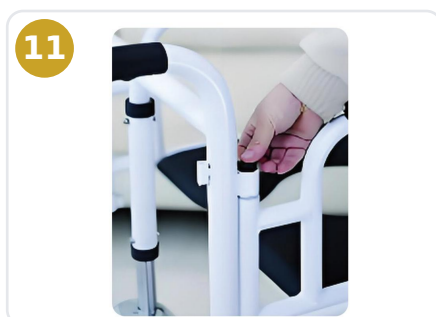

Pasul 11. Fixați capacul de protecție al dispozitivului. Montajul este finalizat.

Reglarea înălțimii șezutului

Slăbiți maneta de blocare și reglați înălțimea șezutului la nivelul dorit, folosind sistemul de reglare. După reglare, strângeți la loc maneta de blocare. Asigurați-vă că ambele laturi ale bazei sunt reglate la aceeași înălțime.

4. Pompa hidraulică

Pompa hidraulică permite însoțitorului să regleze înălțimea șezutului și să ridice pacientul fără efort fizic:

- Pentru ridicare: apăsați ușor pedala, de mai multe ori, cu piciorul, până la înălțimea dorită.
- Pentru coborâre: apăsați pedala complet și mențineți-o apăsată până când șezutul începe să coboare singur.

5. Utilizarea la transferul pacientului

- Așezați pacientul în poziție dreaptă. Deschideți șezutul (cele două jumătăți) și poziționați dispozitivul în fața pacientului, cât mai aproape de acesta.
- Blocați frânele tuturor roților înainte ca pacientul să se așeze.
- Pacientul se înclină ușor, pe rând, spre stânga și spre dreapta, în timp ce rotiți jumătatea de șezut corespunzătoare, astfel încât să se așeze succesiv pe cele două jumătăți ale șezutului.
- Când pacientul este complet așezat, închideți spatele dispozitivului și blocați catarama automată, apoi fixați catarama de siguranță.
- Așezați picioarele pacientului pe suporturile pentru picioare.
- Ridicați șezutul la înălțimea necesară cu ajutorul pedalei hidraulice.
- Cu pacientul așezat și catarama blocată, deblocați frânele și deplasați dispozitivul lent, folosind mânerul.
- La destinație, blocați din nou frânele, deblocați dubla închidere din spate, rotiți și deschideți șezutul — pacientul poate fi transferat lin pe suprafața dorită.

Utilizarea ca scaun de toaletă

Montați vasul de toaletă din PP sub decupajul șezutului. După utilizare, scoateți vasul, goliți-l și igienizați-l. Datorită roților, dispozitivul poate fi folosit și pentru transportul pacientului până la baie.

6. Precauții

- Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă toate componentele sunt complete, corect montate și stabile.
- Nu vă sprijiniți pe pedale la așezarea sau ridicarea din dispozitiv — călcați direct pe podea.
- Reglați dispozitivul la înălțimea potrivită înainte de utilizare; nu reglați înălțimea cât timp pacientul este așezat.
- Asigurați-vă că ambele laturi ale bazei sunt la aceeași înălțime înainte de utilizare.
- Blocați frânele la așezarea și la ridicarea pacientului din dispozitiv.
- Pe suprafețe înclinate, mențineți toate cele patru roți blocate; evitați staționarea pe pante.
- Nu depășiți sarcina maximă de 150 kg.
- Dispozitivul este destinat deplasărilor scurte, în interior, și se utilizează numai cu însoțitor.
- Nu utilizați dispozitivul dacă prezintă defecte, componente slăbite sau lipsă.

7. Specificații tehnice

Model	DW-TPC09
Sarcină maximă	150 kg
Dimensiuni (L × I)	670 × 570 mm
Înălțime șezut	410 – 570 mm, reglabilă hidraulic
Sistem de ridicare	Cilindru hidraulic cu pedală, cursă 150 mm
Perne șezut / spătar / cotiere	PU + burete cu elasticitate ridicată
Masă	ABS, detașabilă, 555 × 355 mm, cu coș de depozitare
Vas toaletă	PP (polipropilenă), detașabil
Roți	Silențioase, cu frână
Greutate netă / brută	36 kg / 39 kg
Durata de viață	5 ani
Ambalare	Cutie de carton 71 × 58 × 38 cm, 1 buc / cutie

8. Curățare și întreținere

- Curățați șezutul și pernele cu o lavetă umezită în apă rece sau caldă; pentru pete dificile folosiți un burete moale și detergent neutru.
- Elementele din plastic (masa, vasul de toaletă) se curăță cu lavetă umedă și detergenți potriviți pentru plastic, conform instrucțiunilor producătorului acestora.
- Goliți și dezinfectați vasul de toaletă după fiecare utilizare.
- Verificați periodic strângerea șuruburilor, piulițelor și a celorlalte elemente de fixare; înlocuiți imediat piesele deteriorate.
- La demontare și remontare, urmați cu atenție instrucțiunile, pentru a evita deteriorarea componentelor.

9. Ambalare, transport și depozitare

- Produsul este ambalat în cutie de carton.
- La transport, manipulați cu grijă, nu răsturnați coletul și feriți-l de ploaie.
- Depozitați în spații bine ventilate, cu umiditate relativă de maximum 80%, fără gaze corozive, ferit de acțiunea directă a razelor solare.

10. Garanție

Produsul beneficiază de garanție în condițiile legislației în vigoare și ale certificatului de garanție care însoțește produsul. Pentru orice solicitare de garanție, păstrați dovada achiziției (factura sau bonul fiscal) și contactați Golden Protect folosind datele din subsolul acestui document.

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare. Utilizați produsul sub îndrumarea personalului medical atunci când este cazul. Păstrați manualul pe toată durata de utilizare a produsului.