

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Bavetă adult impermeabilă cu capse, 46 × 76 cm

Față țesătură bumbac/poliester în carouri albastru-alb · spate laminat PVC · bias alb · închidere reglabilă cu capse metalice



Imagine cu titlu informativ

Bavetă textilă **reutilizabilă** pentru adulți, destinată protejării îmbrăcăminții în timpul mesei, la persoane vârstnice, cu mobilitate redusă sau cu dificultăți de coordonare. Fața din țesătură bumbac/poliester este confortabilă și absorbantă, iar stratul de PVC laminat de pe spate este complet impermeabil; se închide la gât cu capse reglabile.

Denumire producător **Adult Bib 18 × 30" with blue PVC – Blue Damiers**

Referință fișă **GEN_R4 E18 Indice B (06.11.2019)**

Categorie **Articole textile de îngrijire – bavete pentru adulți**

Distribuitor **SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. – Golden Protect**

Utilizare **Spitale, cămine, centre de îngrijire, domiciliu**

46 × 76 cm**Spate PVC impermeabil****Capse reglabile****Spălare 75 °C**

DATE TEHNICE

DIMENSIUNI		MATERIALE ȘI CONSTRUCȚIE	
Dimensiuni (I × L)	46 × 76 cm (18 × 30")	Față	Țesătură bumbac/poliester 50/50, 140 g/m²
Toleranță dimensională	± 2 %	Spate	Tricot 100 % PES 50 g/m², laminat PVC albastru
Decupaj gât	Rotund, Ø 15 cm	Masă totală strat impermeabil	240 g/m²
Lățime bias	1,5 cm	Finisaj margini	Bias alb pe tot conturul
Poziție capse	2 cm de la margine, pas 4 cm	Închidere	3 capse tată (față) + 1 capsă mamă (spate)
Culoare	Carouri albastru-alb (Blue Damiers)	Ambalare	1 buc / carton


CARACTERISTICI

- **Două straturi cu funcții distincte:** fața textilă absoarbe și reține lichidele, spatele din PVC le oprește înainte să ajungă pe haine.
- **Format generos, 46 × 76 cm:** acoperă pieptul și poala persoanei așezate la masă sau în pat.
- **Închidere cu capse metalice,** reglabilă în trei poziții – fără șnururi care se dezleagă sau se pierd la spălare.
- **Bias alb de 1,5 cm pe tot conturul:** întărește marginea și previne destrămarea după spălări repetate.
- **Lavabilă la 75 °C:** temperatură compatibilă cu procedurile de igienizare din unitățile de îngrijire.
- **Aspect discret,** în carouri, asemănător unui articol vestimentar obișnuit.

INDICAȚII DE UTILIZARE

- Persoane vârstnice sau dependente, hrânite asistat; pacienți cu tremor, sechele după AVC sau tulburări de coordonare.
- Cămine de bătrâni, centre de îngrijire, secții de spital și îngrijire la domiciliu – înlocuiește bavetele de unică folosință.

DESEN TEHNIC ȘI DETALIU ÎNCHIDERE

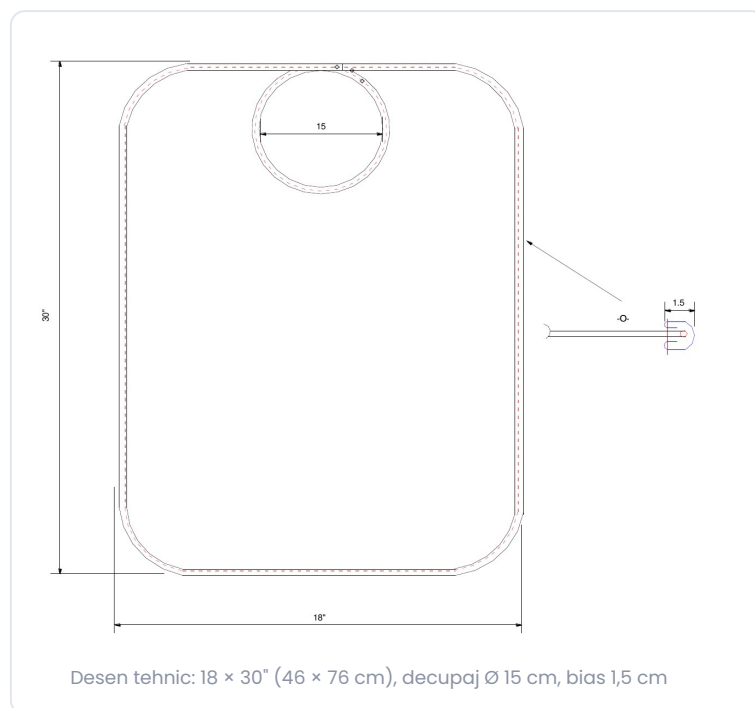

Detaliu: 3 capse tată pe față, 1 capsă mamă pe spate, bias alb

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Așezați baveta cu fața în carouri spre exterior și stratul de PVC (albastru deschis) spre corp.
 2. Treceți decupajul rotund peste cap sau, dacă persoana nu poate ridica brațele, desfaceți capsele și așezați baveta din față.
 3. Închideți capsă mamă pe una dintre cele trei capse tată, alegând poziția care nu strânge gâtul.
1. Întindeți baveta peste piept și poală; la persoanele în pat, așezați partea inferioară peste pătură.
 2. După masă, desfaceți capsă și scoateți baveta fără a o trage peste cap, ca să nu răsturnați resturile.
 3. Spălați după fiecare utilizare sau conform protocolului intern de igienă al unității.

ÎNTREȚINERE

75 °C

Spălare la max. 75 °C



Fără înălbitor / clor



Nu se usucă în uscător



Nu se calcă



Fără curățare chimică

- Se usucă întinsă sau pe umeraș, la aer. Căldura directă (uscător, fier de călcat, calorifer) poate deteriora stratul de PVC.
- Înainte de spălare, îndepărtați resturile solide și închideți capsele, ca să nu agațe alte articole.

Avertizări. Produsul nu este destinat copiilor. Nu lăsați capsă strânsă în poziția care apasă pe gât. Nu utilizați baveta ca protecție împotriva lichidelor fierbinți în cantitate mare. Verificați periodic starea capselor și a biasului; la uzură vizibilă, scoateți produsul din uz.

Document informativ întocmit de Golden Protect pe baza fișei tehnice a producătorului (GEN_R4 E18 Indice B). Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; imaginile sunt cu titlu de prezentare.