

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Aleză impermeabilă reutilizabilă pentru pat, 85 × 160 cm

3 straturi: față poliester · miez absorbant 330 g/m² · spate laminat impermeabil · format pentru pat dubluDetaliu: față verde matlasată,
spate impermeabil albastru

Aleză textilă **reutilizabilă** cu barieră impermeabilă, destinată protecției saltelei și a lenjeriei la persoanele cu incontinență, imobilizate la pat sau în perioada de recuperare. Fața din poliester este moale și absoarbe rapid, miezul de 330 g/m² reține lichidele, iar stratul laminat de pe spate oprește orice scurgere către saltea. Lățimea de 160 cm acoperă transversal întreg patul dublu.

Denumire producător **Barrière underpad 85 × 160 (Alèze)**Referință fișă **Technical Chart 26.02.2024 · desen NAL004**Categorie **Articole textile de îngrijire – aleze și protecții pat**Distribuitor **SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. – Golden Protect**Utilizare **Spitale, cămine, centre de îngrijire, domiciliu**

85 × 160 cm

3 straturi

Impermeabilă

Reutilizabilă

DATE TEHNICE

DIMENSIUNI ȘI AMBALARE		CONSTRUCȚIE ȘI MATERIALE	
Dimensiuni (l × L)	85 × 160 cm	Strat superior	100 % poliester, 90 g/m ²
Toleranță dimensională	± 2 %	Miez absorbant	95 % poliester + 5 % viscoză, 330 g/m ²
Formă	Dreptunghiulară, colțuri rotunjite	Strat inferior impermeabil	100 % poliester laminat, 90 g/m ²
Culoare	Verde (față) / albastru (spate)	Masă totală	≈ 510 g/m ²
Ambalare	Cutie 47 × 32 × 53 cm, sac de protecție	Finisaj margini	Surfilate, cusătură zigzag


CARACTERISTICI

- Barieră impermeabilă:** stratul laminat de pe spate protejează salteaua și reduce mirosurile persistente.
- Absorbție ridicată:** miez de 330 g/m² cu viscoză, care reține și distribuie lichidul pe toată suprafața.
- Format pentru pat dublu:** așezată transversal, acoperă întreaga lățime de 160 cm a patului matrimonial.
- Reutilizabilă:** rezistă la spălări repetate și înlocuiește consumul de aleze de unică folosință.
- Confort:** față textilă moale, silențioasă, fără senzația de plastic a protecțiilor din PVC.
- Discretă:** culoare verde uniformă, potrivită și pentru uz casnic.


INDICAȚII DE UTILIZARE

- Persoane cu incontinență urinară sau fecală, pacienți imobilizați, lăuze, recuperare post-operatorie.
- Cămine de bătrâni, secții de spital, centre de îngrijire și îngrijire la domiciliu; protecție pentru pat dublu sau simplu.

DESEN TEHNIC ȘI POZIȚIONARE PE PAT

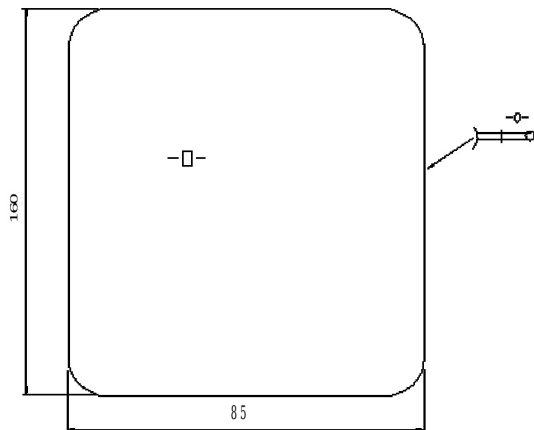

Desen tehnic producător: 85 × 160 cm, colțuri rotunjite

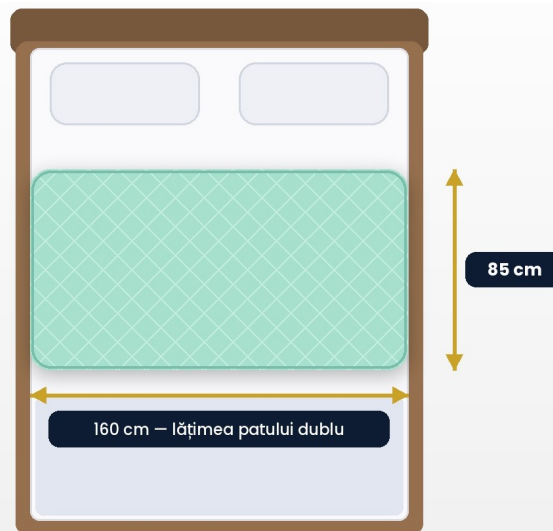

Așezată transversal pe pat dublu 160 × 200 cm, în zona bazinului

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Așezați aleza direct peste cearșaf, cu fața verde matlasată în sus și stratul albastru impermeabil spre saltea.
 2. Pe patul dublu, poziționați-o transversal, în zona bazinului; pe patul simplu se poate așeza pe lungime.
 3. Întindeți-o fără cute; nu lăsați marginile îndoite sub pacient.
1. Peste aleză se poate pune un cearșaf subțire, dacă pacientul preferă contactul cu bumbacul.
 2. Schimbați aleza imediat ce este udă; nu o lăsați umedă sub pacient perioade lungi.
 3. Verificați periodic integritatea stratului impermeabil; la uzură vizibilă, scoateți produsul din uz.

ÎNȚREȚINERE

- Spălare în mașină cu detergent obișnuit, conform indicațiilor de pe eticheta produsului; nu folosiți înălbitor pe bază de clor și nu curățați chimic.
- Nu călcați și nu expuneți la căldură directă (uscător la temperatură mare, calorifer) – stratul laminat se poate deteriora. Uscăți întinsă sau pe umeras.
- Înainte de spălare, îndepărtați resturile solide; spălați separat de articolele care lasă scame.

Avertizări. Produsul nu este un dispozitiv de tratament al incontinenței; asigură doar protecția saltei și a lenjeriei. Nu utilizați aleza ca dispozitiv de transfer sau ridicare a pacientului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

Document informativ întocmit de Golden Protect pe baza fișei tehnice a producătorului (Technical Chart 26.02.2024, desen NAL004). Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; imaginile sunt cu titlu de prezentare.