

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Aleză impermeabilă reutilizabilă cu aripi, 85 × 90 cm

zonă absorbantă cu 3 straturi · două aripi de 45 cm care se introduc sub saltea · nu alunecă, nu se cutează



Imagine producător: aleza pe pat, cu aripile sub saltea

Aleză textilă **reutilizabilă** cu barieră impermeabilă și **două aripi laterale** de 45 cm care se introduc sub saltea, astfel încât aleza rămâne întinsă și nu alunecă sub pacient. Zona centrală de 85 × 90 cm are trei straturi: față din poliester, miez absorbant de 330 g/m² și spate laminat impermeabil. Este destinată paturilor simple (90 cm) din spitale, cămine și îngrijire la domiciliu.

Denumire producător **Barrière underpad 85 × 90 with flaps (Alèze avec rabats)**Referință fișă **Technical Chart 24.06.2013 · desen NAL002**Categorie **Articole textile de îngrijire – aleze și protecții pat**Distribuitor **SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. – Golden Protect**Utilizare **Spitale, cămine, centre de îngrijire, domiciliu**

85 × 90 cm

Aripi 2 × 45 cm

3 straturi

Impermeabilă

Reutilizabilă

DATE TEHNICE

DIMENSIUNI		CONSTRUCȚIE ȘI MATERIALE	
Zonă absorbantă	85 × 90 cm	Strat superior	100 % poliester, 90 g/m ²
Aripi (2 buc)	45 × 85 cm, 100 % poliester	Miez absorbant	95 % poliester + 5 % viscoză, 330 g/m ²
Lățime totală desfăcută	180 cm (45 + 90 + 45)	Strat inferior impermeabil	100 % poliester laminat, 90 g/m ²
Toleranță dimensională	± 2 %	Masă totală zonă absorbantă	≈ 510 g/m ²
Culoare	Verde / aripi albe	Finisaj margini	Surfilate; lizieră pe marginile aripilor



CARACTERISTICI

- **Barieră impermeabilă:** stratul laminat de pe spate protejează salteaua și reduce mirosurile persistente.
- **Absorbție ridicată:** miez de 330 g/m² cu viscoză, care reține și distribuie lichidul pe toată suprafața.
- **Aripi de fixare:** cele două aripi de 45 cm se introduc sub saltea și țin aleza întinsă – fără cute sub pacient, fără re poziționări.
- **Reutilizabilă:** rezistă la spălări repetate și înlocuiește consumul de aleze de unică folosință.
- **Confort:** față textilă moale, silențioasă, fără senzația de plastic a protecțiilor din PVC.
- **Dimensionată pentru pat simplu:** zona absorbantă de 90 cm acoperă exact lățimea patului de 90 cm, în dreptul bazinului.

INDICAȚII DE UTILIZARE

- Incontinență urinară sau fecală, pacienți imobilizați, lăuze, recuperare post-operatorie.
- Paturi de spital și de îngrijire de 90 cm, cămine, centre de recuperare, domiciliu.

DESEN TEHNIC ȘI POZIȚIONARE PE PAT

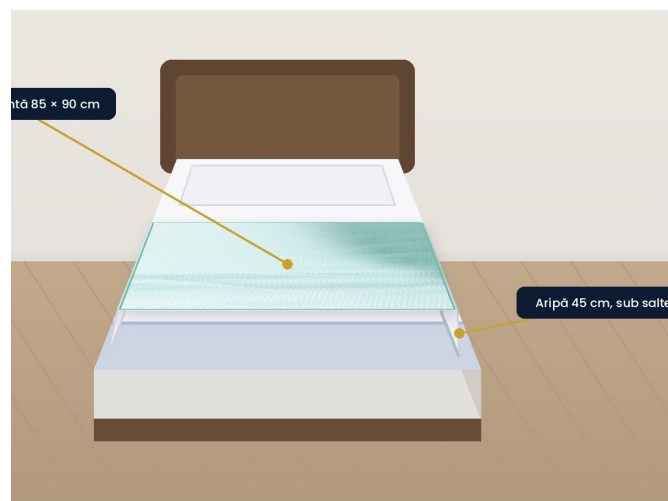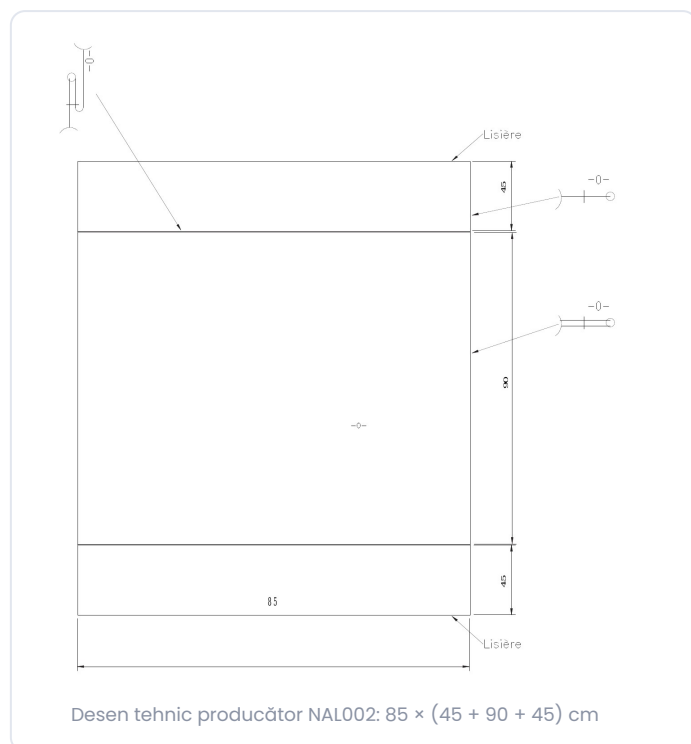

Pe pat simplu 90 cm: zona absorbantă sus, aripile sub saltea

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Așezați aleza peste cearșaf, transversal, cu zona verde în sus, în dreptul bazinului.
2. Ridicați ușor marginea salteii și introduceți fiecare aripă de 45 cm dedesubt, de o parte și de alta a patului.
3. Întindeți zona centrală fără cute; aripile țin aleza fixă la mișcările pacientului.
1. Peste aleză se poate pune un cearșaf subțire, dacă pacientul preferă contactul cu bumbacul.
2. Schimbați aleza imediat ce este udă: scoateți aripile de sub saltea și trageți aleza lateral, fără a ridica pacientul.
3. Verificați periodic integritatea stratului impermeabil; la uzură vizibilă, scoateți produsul din uz.

ÎNTREȚINERE

- Spălare în mașină cu detergent obișnuit, conform indicațiilor de pe eticheta produsului; nu folosiți înălbitor pe bază de clor și nu curățați chimic.
- Nu călcați și nu expuneți la căldură directă (uscător la temperatură mare, calorifer) – stratul laminat se poate deteriora. Uscăți întinsă sau pe umerăș.
- Înainte de spălare, îndepărtați resturile solide; spălați separat de articolele care lasă scame.

Avertizări. Produsul nu este un dispozitiv de tratament al incontinenței; asigură doar protecția salteii și a lenjeriei. Aripile sunt pentru fixare, nu pentru re poziționarea sau ridicarea pacientului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

Document informativ întocmit de Golden Protect pe baza fișei tehnice a producătorului (Technical Chart 24.06.2013, desen NAL002). Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; imaginile sunt cu titlu de prezentare.