

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Aleză impermeabilă reutilizabilă cu mânere, 85 × 90 cm

3 straturi absorbante/impermeabile · 4 mânere din chingă pentru re poziționarea pacientului în pat

Imagine producător:
re poziționare cu doi îngrijitori

Aleză textilă **reutilizabilă** cu barieră impermeabilă și **patru mânere din chingă** (două pe fiecare latură lungă), care permit re poziționarea pacientului în pat de către doi îngrijitori, fără ridicare și fără frecarea pielii de cearșaf. Zona de 85 × 90 cm are trei straturi: față din poliester, miez absorbant de 330 g/m² și spate laminat impermeabil. Destinată pacienților imobilizați, cu risc de escare sau cu mobilitate redusă.

Denumire producător **Barrière underpad 85 × 90 with handles (Alèze)**Referință fișă **Technical Chart 26.02.2024 · desen Mulliez Alèze**Categorie **Articole textile de îngrijire – aleze de re poziționare**Distribuitor **SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. – Golden Protect**Utilizare **Spitale, cămine, centre de îngrijire, domiciliu**

85 × 90 cm

4 mânere

3 straturi

Impermeabilă

Reutilizabilă

DATE TEHNICE

DIMENSIUNI		CONSTRUCȚIE ȘI MATERIALE	
Dimensiuni (l × L)	85 × 90 cm	Strat superior	100 % poliester, 90 g/m ²
Mânere	4 buc (2 pe fiecare latură de 90 cm)	Miez absorbant	95 % poliester + 5 % viscoză, 330 g/m ²
Chingă mâner	40 mm lățime, 100 % poliester, buclă 40 cm	Strat inferior impermeabil	100 % poliester laminat, 90 g/m ²
Poziție mânere	La 20 cm de colțuri	Masă totală	≈ 510 g/m ²
Toleranță dimensională	± 2 %	Fixare mânere	Cusătură întărită în cruce, pe fiecare capăt
Culoare	Verde / spate albastru		


CARACTERISTICI

- **Barieră impermeabilă:** stratul laminat de pe spate protejează salteaua și reduce mirosurile persistente.
- **Absorbție ridicată:** miez de 330 g/m² cu viscoză, care reține și distribuie lichidul pe toată suprafața.
- **Mânere de re poziționare:** doi îngrijitori mută pacientul spre cap sau lateral trăgând simultan de mânere, cu spatele drept și fără ridicare.
- **Reutilizabilă:** rezistă la spălări repetate și înlocuiește consumul de aleze de unică folosință.
- **Dublă funcție:** protecție impermeabilă a saltelei și ajutor de mobilizare într-un singur produs.
- **Protejează pielea:** pacientul alunecă pe aleză, nu pe cearșaf – frecare redusă, risc mai mic de leziuni.

INDICAȚII DE UTILIZARE

- Pacienți imobilizați, cu incontinență, risc de escare sau re poziționare frecventă.
- Spitale, cămine, centre de recuperare, domiciliu (doi îngrijitori).

DESEN TEHNIC ȘI DETALIU MÂNER

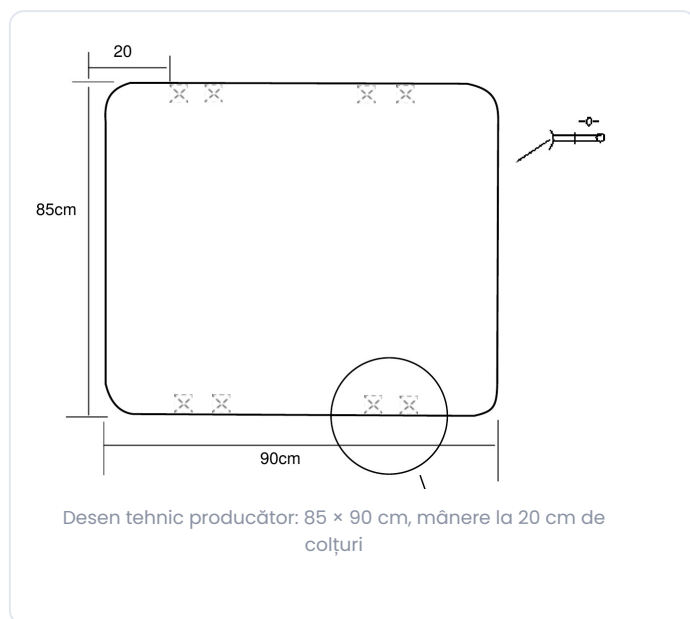

Mâner din chingă de 40 mm, cusut în cruce pe spatele alezei

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Așezați aleza peste cearșaf, cu fața verde în sus, sub pacient, între umeri și coapse; mânerele rămân libere, în afara saltelei.
2. Pentru re poziționare: câte un îngrijitor de fiecare parte a patului prinde cele două mânere de pe latura sa, cu genunchii ușor flexați.
3. La comandă, ambii trag simultan în direcția dorită (spre cap sau lateral); pacientul alunecă pe aleză, fără a fi ridicat.
1. După manevră, verificați ca aleza să fie întinsă, fără cute sub pacient, și mânerele să nu fie sub corp.
2. Schimbați aleza imediat ce este udă; nu o lăsați umedă sub pacient perioade lungi.
3. Verificați înainte de fiecare manevră cusăturile mânerelor și stratul impermeabil; la uzură vizibilă, scoateți produsul din uz.

ÎNȚREȚINERE

- Spălare în mașină cu detergent obișnuit, conform indicațiilor de pe eticheta produsului; nu folosiți înălbitor pe bază de clor și nu curățați chimic.
- Nu călcați și nu expuneți la căldură directă (uscător la temperatură mare, calorifer) – stratul laminat se poate deteriora. Uscați întinsă sau pe umeraș.
- Înainte de spălare, îndepărtați resturile solide; spălați separat de articolele care lasă scame.

Avertizări. Mânerele sunt destinate alunecării/repoziționării pacientului pe suprafața patului, întotdeauna de către doi îngrijitori. Nu ridicați pacientul de mânere, nu îl transferați suspendat între două suprafețe și nu depășiți capacitatea de tracțiune a cusăturilor. Nu utilizați o aleză cu mânere sau cusături deteriorate.

Document informativ întocmit de Golden Protect pe baza fișei tehnice a producătorului (Technical Chart 26.02.2024, desen Mulliez Alêze avec poignées). Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; imaginile sunt cu titlu de prezentare.