

FIȘĂ TEHNICĂ PRODUS

Aleză impermeabilă reutilizabilă pentru pat, 85 × 90 cm

3 straturi: față poliester · miez absorbant 330 g/m² · spate laminat impermeabil · format pentru pat simpluDetaliu: față verde matlasată,
spate impermeabil albastru

Aleză textilă **reutilizabilă** cu barieră impermeabilă, destinată protejării saltelei și a lenjeriei la persoanele cu incontinență, imobilizate la pat sau în perioada de recuperare. Fața din poliester este moale și absoarbe rapid, miezul de 330 g/m² reține lichidele, iar stratul laminat de pe spate oprește orice scurgere către saltea. Lățimea de 90 cm acoperă exact patul de spital sau de îngrijire.

Denumire producător **Barrière underpad 85 × 90 (Alèze)**Referință fișă **Technical Chart 26.02.2024 · desen NAL004**Categorie **Articole textile de îngrijire – aleze și protecții pat**Distribuitor **SPEQTUS ENTERPRISE S.R.L. – Golden Protect**Utilizare **Spitale, cămine, centre de îngrijire, domiciliu**

85 × 90 cm

3 straturi

Impermeabilă

Reutilizabilă

DATE TEHNICE

DIMENSIUNI ȘI AMBALARE		CONSTRUCȚIE ȘI MATERIALE	
Dimensiuni (l × L)	85 × 90 cm	Strat superior	100 % poliester, 90 g/m ²
Toleranță dimensională	± 2 %	Miez absorbant	95 % poliester + 5 % viscoză, 330 g/m ²
Formă	Dreptunghiulară, colțuri rotunjite	Strat inferior impermeabil	100 % poliester laminat, 90 g/m ²
Culoare	Verde (față) / albastru (spate)	Masă totală	≈ 510 g/m ²
Ambalare	34 buc / cutie 47 × 32 × 53 cm	Finisaj margini	Surfilate, cusătură zigzag


CARACTERISTICI

- Barieră impermeabilă:** stratul laminat de pe spate protejează salteaua și reduce mirosurile persistente.
- Absorbție ridicată:** miez de 330 g/m² cu viscoză, care reține și distribuie lichidul pe toată suprafața.
- Format pentru pat simplu:** așezată transversal, acoperă exact lățimea de 90 cm a patului de spital sau de îngrijire.
- Reutilizabilă:** rezistă la spălări repetate și înlocuiește consumul de aleze de unică folosință.
- Confort:** față textilă moale, silențioasă, fără senzația de plastic a protecțiilor din PVC.
- Discretă:** culoare verde uniformă, potrivită și pentru uz casnic.


INDICAȚII DE UTILIZARE

- Persoane cu incontinență urinară sau fecală, pacienți imobilizați, lăuze, recuperare post-operatorie.
- Secții de spital, cămine de bătrâni, centre de îngrijire, domiciliu – paturi de 90 cm.

DESEN TEHNIC ȘI POZIȚIONARE PE PAT

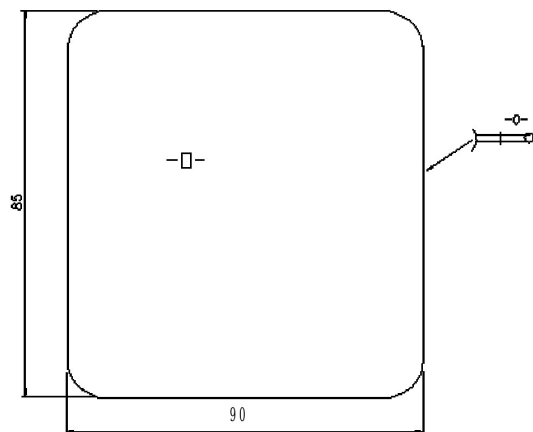

Desen tehnic producător NAL004: 85 × 90 cm, colțuri rotunjite

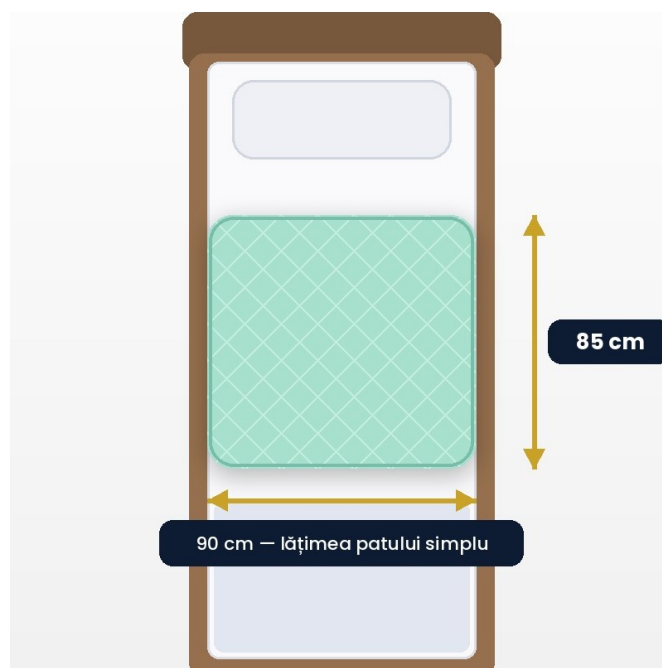

Așezată transversal pe pat simplu 90 × 200 cm, în zona bazinului

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

1. Așezați aleza direct peste cearșaf, cu fața verde matlasată în sus și stratul albastru impermeabil spre saltea.
 2. Poziționați-o transversal, în zona bazinului; latura de 90 cm acoperă lățimea patului.
 3. Întindeți-o fără cute; nu lăsați marginile îndoite sub pacient.
1. Peste aleză se poate pune un cearșaf subțire, dacă pacientul preferă contactul cu bumbacul.
 2. Schimbați aleza imediat ce este udă; nu o lăsați umedă sub pacient perioade lungi.
 3. Verificați periodic integritatea stratului impermeabil; la uzură vizibilă, scoateți produsul din uz.

ÎNȚREȚINERE

- Spălare în mașină cu detergent obișnuit, conform indicațiilor de pe eticheta produsului; nu folosiți înălbitor pe bază de clor și nu curățați chimic.
- Nu călcați și nu expuneți la căldură directă (uscător la temperatură mare, calorifer) – stratul laminat se poate deteriora. Uscăți întinsă sau pe umeras.
- Înainte de spălare, îndepărtați resturile solide; spălați separat de articolele care lasă scame.

Avertizări. Produsul nu este un dispozitiv de tratament al incontinenței; asigură doar protecția saltei și a lenjeriei. Nu utilizați aleza ca dispozitiv de transfer sau ridicare a pacientului. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici.

Document informativ întocmit de Golden Protect pe baza fișei tehnice a producătorului (Technical Chart 26.02.2024, desen NAL004). Specificațiile pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă; imaginile sunt cu titlu de prezentare.